

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380


* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	30	400
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	15	150
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

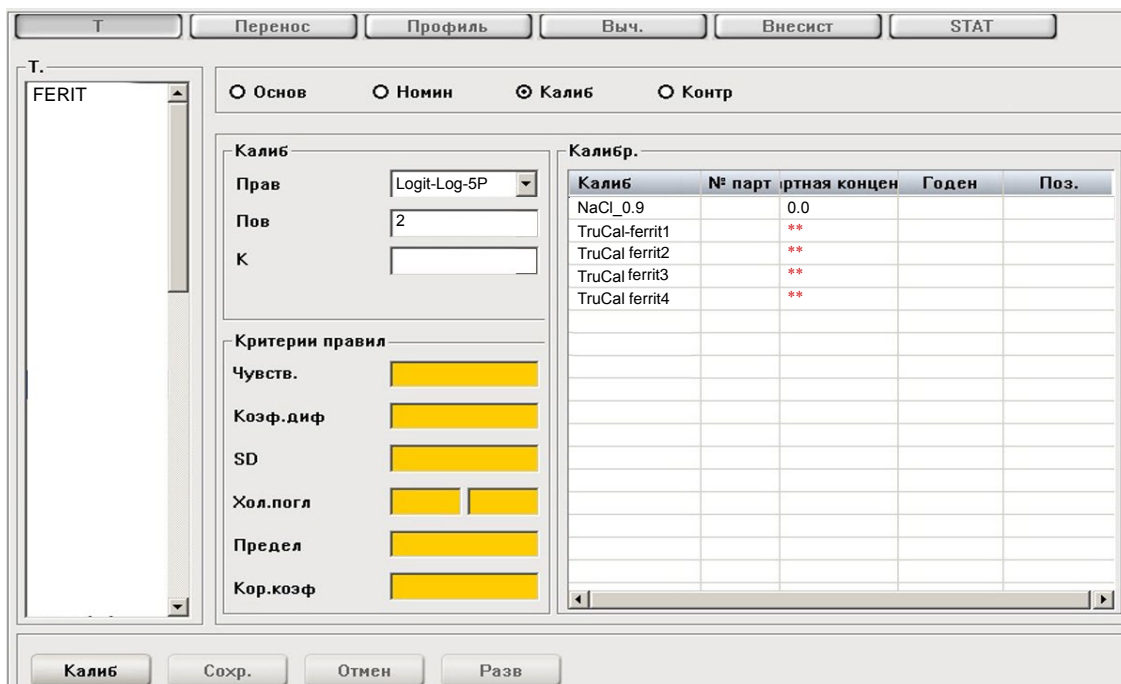

Т.

FERIT

Перенос Профиль Выч. Внесист STAT

Основ
 Нонин
 Калиб
 Контр

Калиб

Прав: Logit-Log-5P

Пов: 2

К:

Критерии правил

Чувств. []

Козф. диф []

SD []

Хол. погл [] []

Предел []

Кор. коэф []

Калибр.

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruCal-ferrit1		**		
TruCal ferrit2		**		
TruCal ferrit3		**		
TruCal ferrit4		**		

Калиб Сохр. Отмен Разв

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: logit-log-5P 5 точек, набор стандартов TruCal Ferritin, 4 уровня + вода (или физр-р).
 Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.