


## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

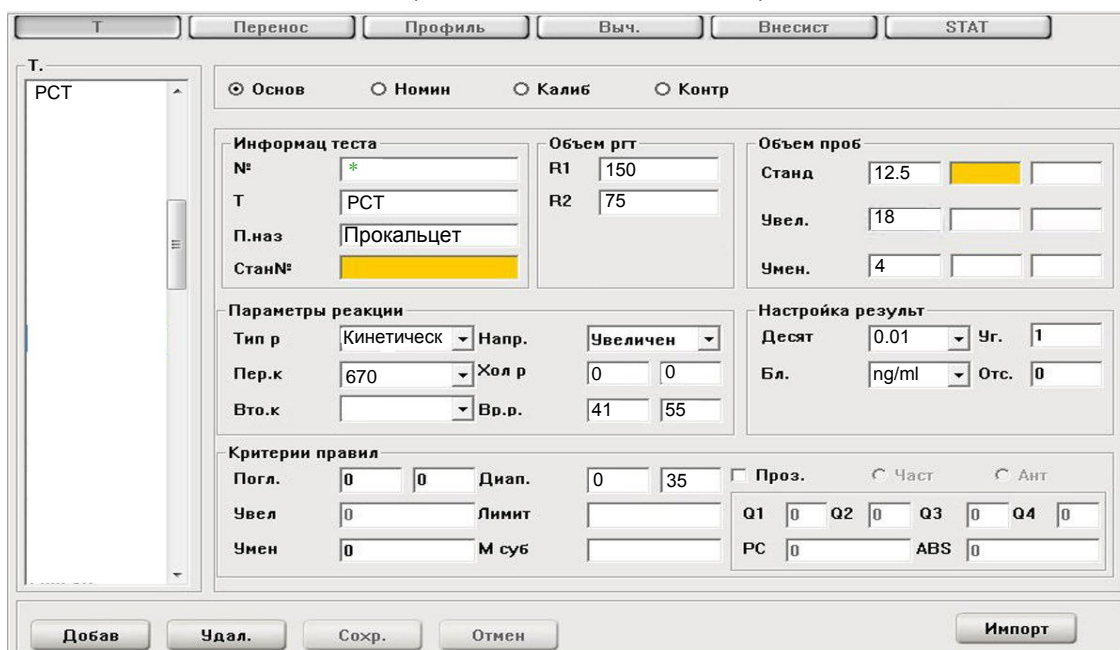

Т. PCT

Основ  Номин  Калиб  Контр

**Информац теста**  
№: \*  
Т: PCT  
П.наз: Прокальцет  
Стан№:

**Объем ргт**  
R1: 150  
R2: 75

**Объем проб**  
Станд: 12.5  
Увел.: 18  
Умен.: 4

**Параметры реакции**  
Тип р: Кинетическ Напр.: Увеличен  
Пер.к: 670 Хол р: 0 0  
Вто.к: Вр.р.: 41 55

**Настройка результат**  
Десят: 0.01 Уг.: 1  
Бл.: ng/ml Отс.: 0


**Критерии правил**  
Погл.: 0 0 Диап.: 0 35  През.  Част  Ант  
Увел.: 0 Лимит:  
Умен.: 0 М суб:  
Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0  
PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

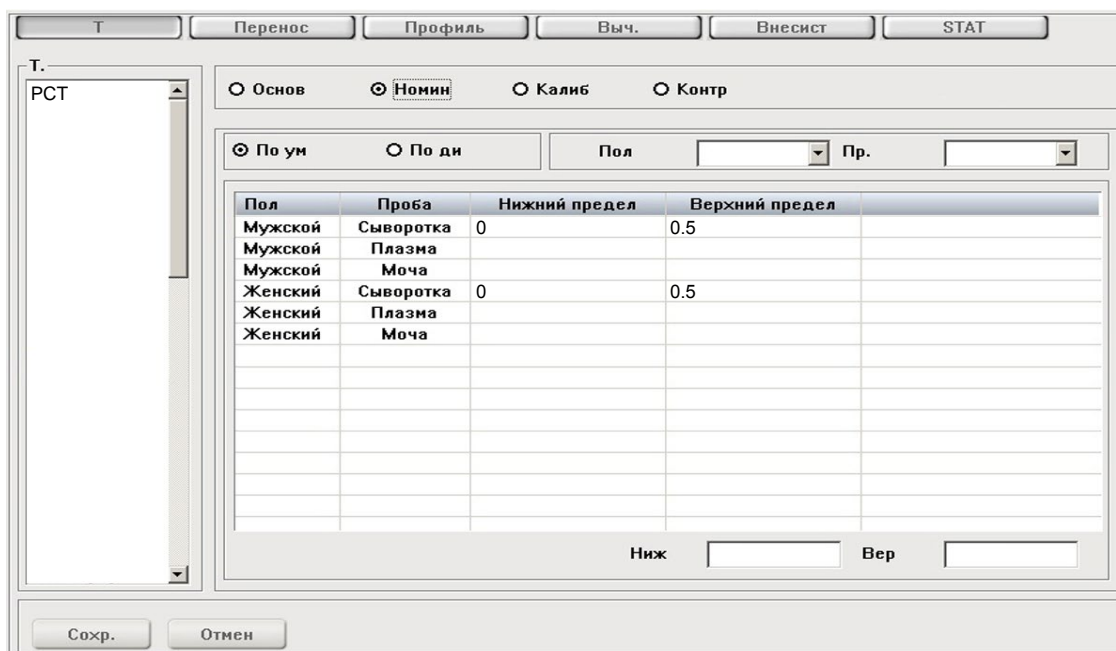

Т. PCT

Основ  Номин  Калиб  Контр


По ум  По дн Пол: Пр.:

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	0.5
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	0.5
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

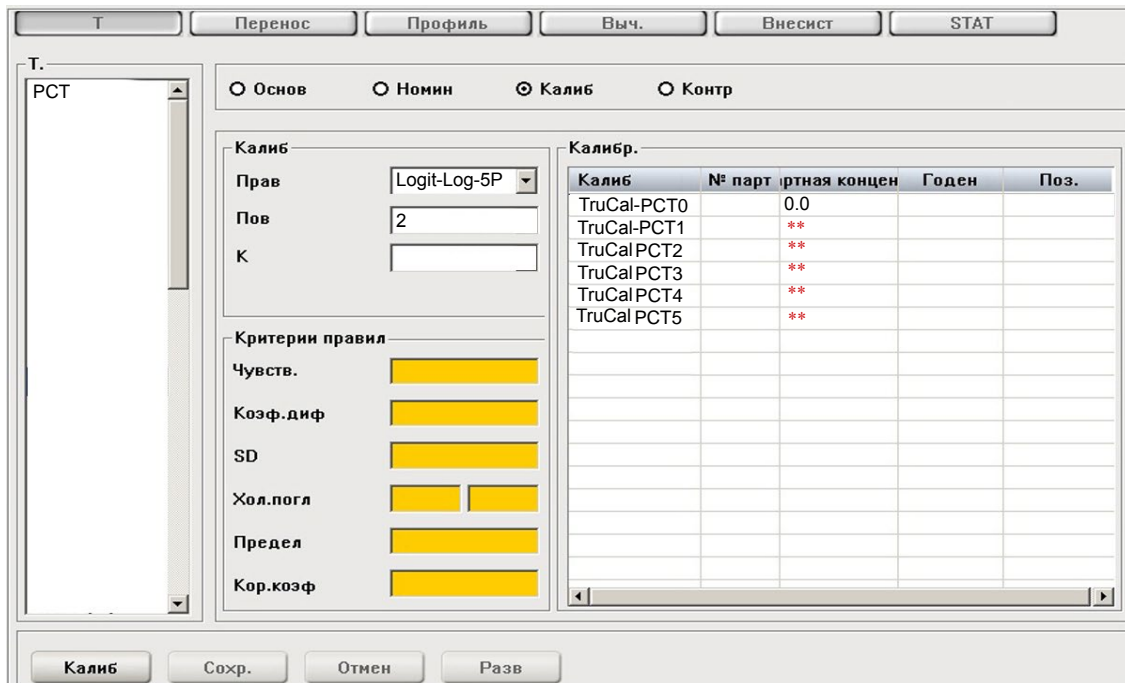

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
TruCal-PCT0		0.0		
TruCal-PCT1		**		
TruCal PCT2		**		
TruCal PCT3		**		
TruCal PCT4		**		
TruCal PCT5		**		

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

TruCal PCT, включает калибратор с конц. 0.  
Контроль по TruLab PCT уровень 1 и уровень 2.