

# C-Реактивный белок (Uhs-универсальный)

ImmunoTD Uhs for U(Иммунотурбодиметрический с латексом, универсальный)



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Т. ЦРБу

Основ  Номин  Калиб  Контр  Инд.с  Кач.ум.

**Информац теста**  
№: \*  
Т: ЦРБу  
П.наз: С-Реактивный белок  
Стан№:

**Объем ргг**  
R1: 150  
R2: 150  
R3:   
R4:

**Объем проб**  
Станд: 3  
Увел.: 6  
Умен.: 2

**Параметры реакции**  
Тип р: Кинетическ Напр.: Увеличен  
Пер.к: 505 Хол р: 0 0  
Вто.к: Вр.р.: 47 67

**Настройка результат**  
Десят: 0.1 Уг.: 1  
Бл.: mg/l Отс.: 0

**Критерии правил**  
Погл.: 0 0 Диап.: 0.3 350 Проз.:  Част  Ант  
Увел.: 0 Лимит:   
Умен.: 0 М суб:

Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0  
PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Т. ЦРБу

Основ  Номин  Калиб  Контр  Инд.с  Кач.ум.

По ум  По дн Пол: Пр.:

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	5
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	5
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

# C-Реактивный белок (Uhs-универсальный)

ImmunoTD Uhs for U (Иммунотурбодиметрический с латексом, универсальный)



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеп	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruCRP1		**		
TruCRP2		**		
TruCRP3		**		
TruCRP4		**		
TruCRP5		**		

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal CRP-U

5 уровней + вода (физр-р).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab CRP уровень 1 и уровень 2.