


Кальций

Arsenaso III (метод с Арсеназо III)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

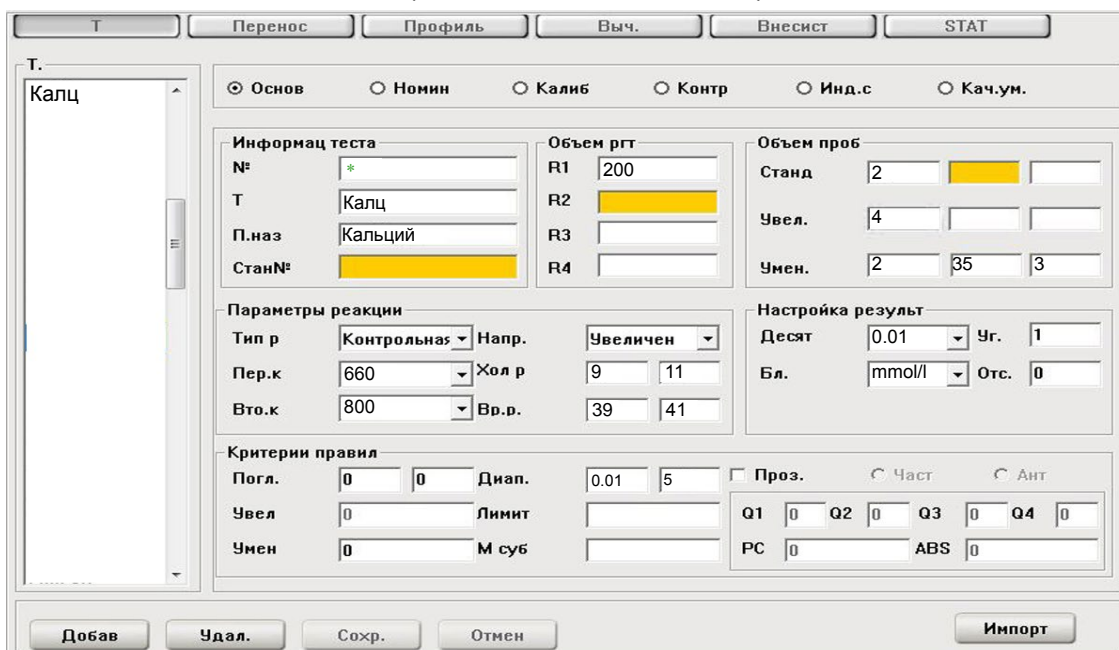

Т. Кальц

Основ Номин Калиб Контр Инд.с Кач.ум.

Информация теста
№: *
Т: Кальц
П.наз: Кальций
Стан№:

Объем ргг
R1: 200
R2:
R3:
R4:

Объем проб
Станд: 2
Увел.: 4
Умен.: 2 35 3

Параметры реакции
Тип р: Контрольная Напр.: Увеличен
Пер.к: 660 Хол р: 9 11
Вто.к: 800 Вр.р.: 39 41

Настройка результат
Десят: 0.01 Уг.: 1
Бл.: mmol/l Отс.: 0


Критерии правил
Погл.: 0 0 Диап.: 0.01 5
Увел.: 0 Лимит:
Умен.: 0 М суб:
Проз.: Част Ант
Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0
PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

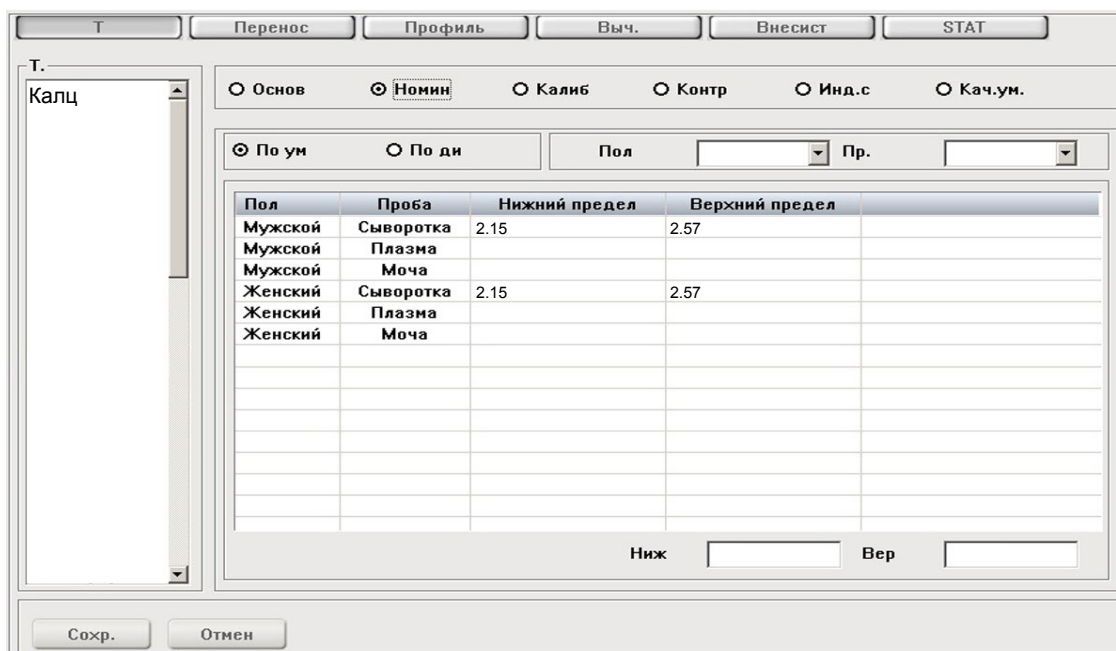

Т. Кальц

Основ Номин Калиб Контр Инд.с Кач.ум.

По ум По дн Пол: Пр.:


| Пол | Проба | Нижний предел | Верхний предел |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| Мужской | Сыворотка | 2.15 | 2.57 |
| Мужской | Плазма | | |
| Мужской | Моча | | |
| Женский | Сыворотка | 2.15 | 2.57 |
| Женский | Плазма | | |
| Женский | Моча | | |

Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

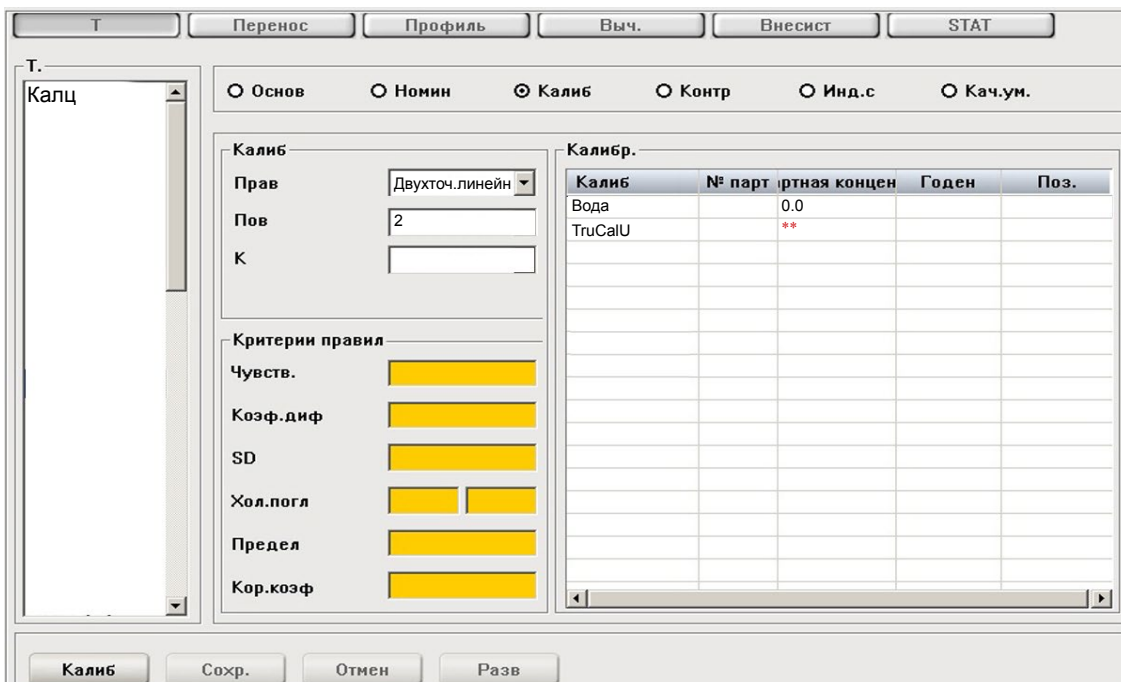

| Калиб | № парт | ртная концен | Годеп | Поз. |
|---------|--------|--------------|-------|------|
| Вода | | 0.0 | | |
| TruCalU | | ** | | |

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по стандарту из набора.
Контроль по TruLab N и TruLab P.

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно