

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-100/200

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
★ Тест : MYO	Автоповтор : <input type="checkbox"/>	Он-лайн калибровка : <input type="checkbox"/>
Наим. отчёта : Миоглобин	Он-лайн калибровка : <input type="checkbox"/>	Cuvette Wash : <input type="checkbox"/>
Ед. : ug/l	Знаки п/запятой : 1	Всего реагентов : 2
Основная дл. волны : 570	Вспомогат. : -----	★ Реагент R1 : MYO R1
Тип метода : RATE A	Тип калибровки : 5p-logit-log	★ Реагент R2 : MYO R2
Нач. M1 : 0	Кон. M1 : 0	
★ Нач. M2 : 20	★ Кон. M2 : 30	
Дубли пробы : 1	Дубли стандарта : 2	
Дубли контроля : 1	Интервал контроля : 0	
Напр-ние реакции : Увеличение	Предел погл. : 0.0	
Предел прозоны, % : 0	Проверка прозоны : Нижн.	
Предел лин-сти, % : 0	Приращ. погл./мин. : 0.0	
Технич. минимум : 5	Технич. максимум : 600	
Y=aX+b a= 1 b= 0		

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
Тест : MYO		
Тип пробы : SERUM		

Объемы проб				Типы проб	
★ Норм.	: 5	µl	Проп. развед.	: 1	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM
Увелич.	: 10	µl	Проп. развед.	: 1	<input type="checkbox"/> URINE
Уменьш.	: 3	µl	Проп. развед.	: 1	<input type="checkbox"/> CSF
★ Объем стандарта	: 5	µl			<input type="checkbox"/> PLASMA
					<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD
					<input type="checkbox"/> OTHER

Объемы реагентов и скор. мешалки			
★ Объем R1	: 150	µl	★ Скор. мешалки R1 : Сред.
★ Объем R2	: 50	µl	★ Скор. мешалки R2 : Выс.

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-100/200

Подробнее		Объёмы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: MYO				
Тип пробы	: SERUM				
Контр. интервал	: 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)				
Категория	: Муж				
Контр. интервал			Типы проб		
	Нижн. предел		Верхн. предел		
★ Норм.	: 0		70	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM	<input type="checkbox"/> URINE
Экстр.	: 0		0	<input type="checkbox"/> CSF	<input type="checkbox"/> PLASMA
				<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD	<input type="checkbox"/> OTHER
				КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ	
				ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ	

Подробнее		Объёмы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: MYO				
Тип пробы	: SERUM				
Контр. интервал	: 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)				
Категория	: Жен				
Контр. интервал			Типы проб		
	Нижн. предел		Верхн. предел		
★ Норм.	: 0		70	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM	<input type="checkbox"/> URINE
Экстр.	: 0		0	<input type="checkbox"/> CSF	<input type="checkbox"/> PLASMA
				<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD	<input type="checkbox"/> OTHER
				КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ	
				ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ	

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Слайн, 5 точек. (набор стандартов TruCal Myoglobin, 4 уровня + вода или физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !