



Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

АпоА1

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител. []

Повторы 2

Интервал(дн) []

Предел разл. []

SD []

Холост. ответ [] []

Предел ошибки []

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> ТсА1-В-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> ТсА1-В-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> ТсА1-В-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> ТсА1-В-4	**

Назв []

Конц. []

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Лог-лог5р, (сплайн, сплайн2) 6 точек

Набор стандартов TruCal Apo A1-B 5 уровней + вода (или физраствор).

Контроль по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.