

Микроальбумин

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический, для определения в моче)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-800

Опред./правка химанализов

Хим.	MAIb	№ *		Тип пробы	Моча
Химанализ	Иммунотурбодиметрический			Имя для печ	Микроальбумин

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Тип реакции	Контрольная точка	Направление реакции	Положительный	
Перв. д/в	412	Втор. д/в	800	
Ед.изм.	мг/л	Десятич	0,1	
Время хол.	13 15	Время реакции	31 33	
Об. Пробы	Стандарт 7.5 uL	Аспирировано	Разбавитель	Холост.проб
Понижен.	1.5 uL			P1 150 uL P2 30 uL
Повышенный	15 uL			P3 uL P4 uL

Диап.линейности	3 350	<input type="checkbox"/> Автоповтор	
Предел линейности		Истощение субстрата	
Поглощ.хол. P1	-34000 34000	Смеш.хол.погл.	-34000 34000
Отклик холост.	-34000 34000	Вр.после открытия	Дней
Парн.химанализ			
<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	<input checked="" type="radio"/> Пров. скорости	<input checked="" type="radio"/> Внесение антигена	
Q1	Q2	Q3	Q4
PC	ABS		

Нормальные величины для мочи:

Мужчины: 0-30

Женщины: 0-30

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal Alb U CSF, 5 уровней + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Urine уровень 1 и уровень 2.