

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
СК	<input checked="" type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
	Проверка	СК	
	Тип реакции	кинетика	
	Пер	340	<input type="checkbox"/> X/п реаг.
	Втор		Направл
	Задерж(с)	90	Об.Аспир.(мкл)
	Время изм.(с)	180	Темп
	Блок	Ед/л	Десятичн.
	Полное имя	КФК	
	Ув.	500	
<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>			

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
СК	<input type="radio"/> Основной <input checked="" type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
	Эталон по умолч.	0	---
	Лин.диапазон	1	---
	АБС х/п реаг.		---
	Пред.поглощен.		
	Лин.предел(%)	30	
	<input type="button" value="По дифф"/>		
<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>			

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
СК	<input type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input checked="" type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
	<input type="radio"/> Коэффиц.К		
	<input checked="" type="radio"/> Правило		
	Повторить		
	<input checked="" type="checkbox"/> S1	См.паспорт	<input type="checkbox"/> S5
	<input type="checkbox"/> S2		<input type="checkbox"/> S6
	<input type="checkbox"/> S3		<input type="checkbox"/> S7
	<input type="checkbox"/> S4		<input type="checkbox"/> S8
	<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>		