

Erba XL-100/200

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: C3C	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>	Он-лайн калибровка	: <input type="checkbox"/>
Наим. отчёта	: C3c	Cuvette Wash	: <input type="checkbox"/>	Всего реагентов	: 2
Ед.	: g/l	Знаки п/запятой	: 2	★ Реагент R1	: C3C R1
Основная дл. волны	: 340	Вспомогат.	: ----	★ Реагент R2	: C3C R2
Тип метода	: 2POINT	Тип калибровки	: 5p-logit-log		
Нач. M1	: 15	Кон. M1	: 16		
★ Нач. M2	: 33	★ Кон. M2	: 34		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2		
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: Нижн.		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 0	Технич. максимум	: 5		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: C3C	Тип пробы	: SERUM		
Объемы проб			Типы проб		
★ Норм.	: 2.6	µl	Проп. развед.	: 1	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM
Увелич.	: 5	µl	Проп. развед.	: 1	<input type="checkbox"/> URINE
Уменьш.	: 2.6	µl	Проп. развед.	: 4	<input type="checkbox"/> CSF
★ Объем стандарта	: 2.6	µl			<input type="checkbox"/> PLASMA
Объемы реагентов и скор. мешалки			<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD		
★ Объем R1	: 180	µl	★ Скор. мешалки R1	: Сред.	<input type="checkbox"/> OTHER
★ Объем R2	: 36	µl	★ Скор. мешалки R2	: Выс.	

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

Подробности | Объёмы теста | Контрольные интервалы

Тест : C3C
 Тип пробы : SERUM
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)
 Категория : Муж

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	0.9	1.8	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	0	0	

[КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ](#)
[ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ](#)

Подробности | Объёмы теста | Контрольные интервалы

Тест : C3C
 Тип пробы : SERUM
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)
 Категория : Жен

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	0.9	1.8	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	0	0	

[КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ](#)
[ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ](#)

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Слайн, 6 точек. (набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода или физраствор).
 Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !