

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
EtOH	<input checked="" type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
	Проверка	EtOH	
	Тип реакции	конечн.точка	
	Пер	340	<input checked="" type="checkbox"/> X/п реаг.
	Втор		Направл
	Задерж(с)	10	Об.Аспир.(мкл)
	Время изм.(с)	6	Темп
	Блок	г/л	Десятичн.
	Полное имя	Этанол	
	Ув.	500	37
Добав.	Удал.	Сохр.	Отмена
			Возвр.

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
EtOH	<input type="radio"/> Основной <input checked="" type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
	Эталон по умолч.	0	---
	Лин.диапазон	0,1	---
	АБС х/п реаг.		---
	Пред.поглощен.		
	Лин.предел(%)		
	<input type="button" value="По дифф"/>		
Добав.	Удал.	Сохр.	Отмена
			Возвр.

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
EtOH	<input type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input checked="" type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
	<input type="radio"/> Коэффиц.К		
	<input checked="" type="radio"/> Правило		
	Повторить		
	<input checked="" type="checkbox"/> S1	0	<input type="checkbox"/> S5
	<input checked="" type="checkbox"/> S2	По р-ру	<input type="checkbox"/> S6
	<input type="checkbox"/> S3		<input type="checkbox"/> S7
	<input type="checkbox"/> S4		<input type="checkbox"/> S8
	2-точ.линейная		
	2		
Добав.	Удал.	Сохр.	Отмена
			Возвр.