


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

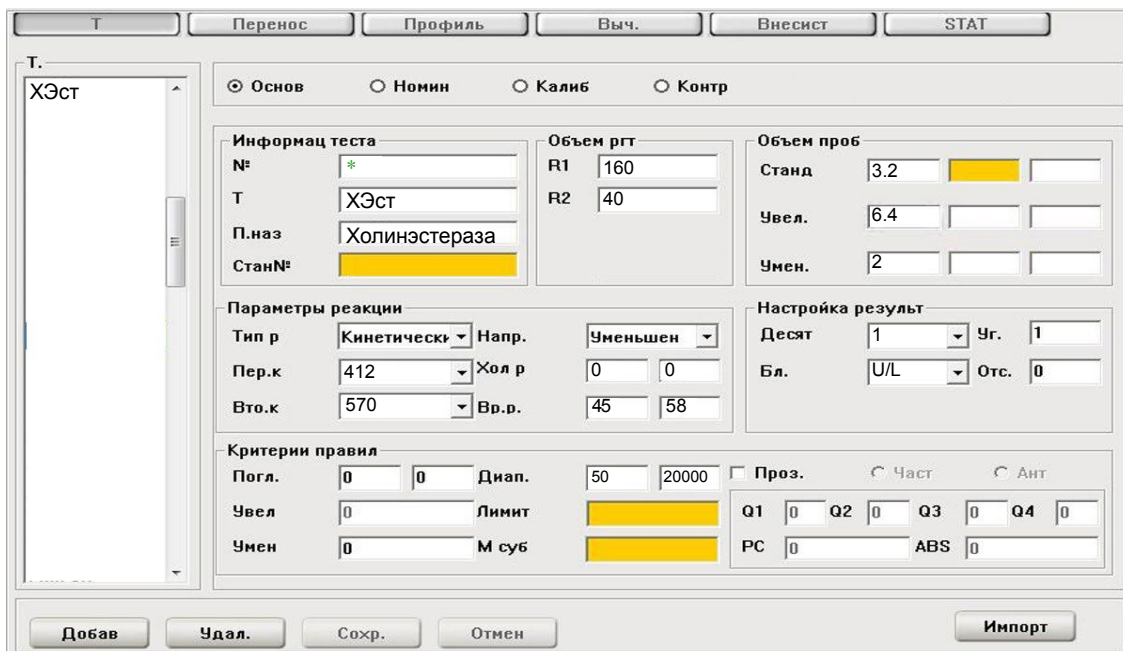

Т. ХЭст

Основ Номин Калиб Контр

Информац теста
 №: *
 Т: ХЭст
 П.наз: Холинэстераза
 Стан№:

Объем ргг
 R1: 160
 R2: 40

Объем проб
 Станд: 3.2
 Увел.: 6.4
 Умен.: 2

Параметры реакции
 Тип р: Кинетически Напр.: Уменьшен
 Пер.к: 412 Хол р: 0 0
 Вто.к: 570 Вр.р.: 45 58

Настройка результат
 Десят: 1 Уг.: 1
 Бл.: U/L Отс.: 0

Критерии правил
 Погл.: 0 0 Диап.: 50 20000
 Увел.: 0 Лимит:
 Умен.: 0 М суб:


Проз. Част. Ант
 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0
 PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

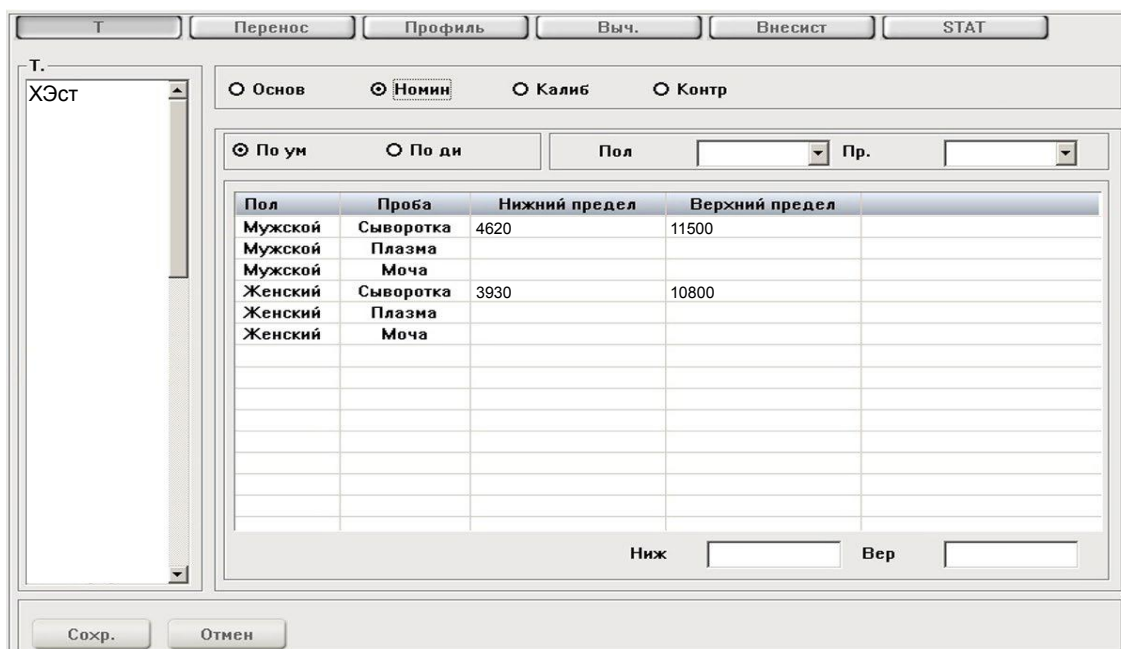

Т. ХЭст

Основ **Номин** Калиб Контр

По ум По дн Пол: Пр.:


| Пол | Проба | Нижний предел | Верхний предел |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| Мужской | Сыворотка | 4620 | 11500 |
| Мужской | Плазма | | |
| Мужской | Моча | | |
| Женский | Сыворотка | 3930 | 10800 |
| Женский | Плазма | | |
| Женский | Моча | | |

Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

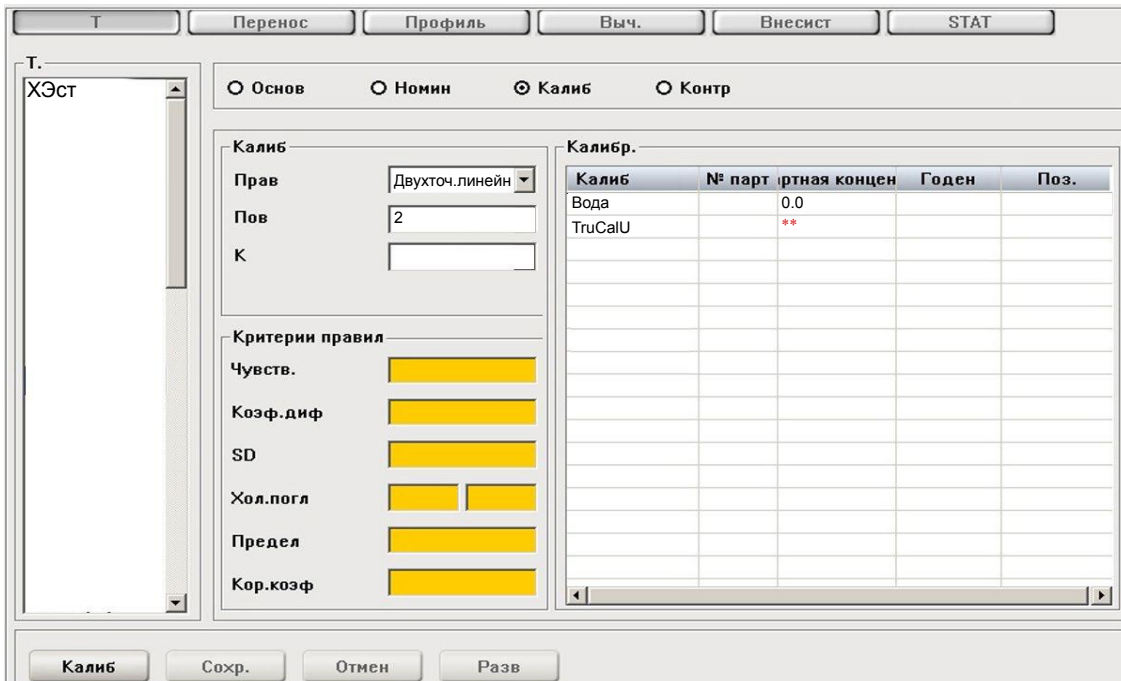

The screenshot shows the 'Калибр.' (Calibration) window in the Mindray BS-380 software. The window has a title bar with buttons for 'Т', 'Перенос', 'Профиль', 'Выч.', 'Внесист', and 'STAT'. Below the title bar are radio buttons for 'Основ', 'Нонин', 'Калиб', and 'Контр', with 'Калиб' selected. The main area is divided into several sections:

- Калиб:** Contains input fields for 'Прав' (set to 'Двухточ.линейн'), 'Пов' (set to '2'), and 'К'.
- Критерии правил:** Contains sliders for 'Чувств.', 'Козф. диф', 'SD', 'Хол.погл', 'Предел', and 'Кор.коэф'.
- Калибр. Table:** A table with columns 'Калиб', '№ парт', 'ртная концен', 'Годен', and 'Поз.'. It contains two rows: 'Вода' with '0.0' in the 'ртная концен' column, and 'TruCalU' with '**' in the 'ртная концен' column.

At the bottom of the window are buttons for 'Калиб', 'Сохран.', 'Отмен', and 'Разв'.

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по фактору.
Контроль по TruLab N и TruLab P.