


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

Биреагентное применение

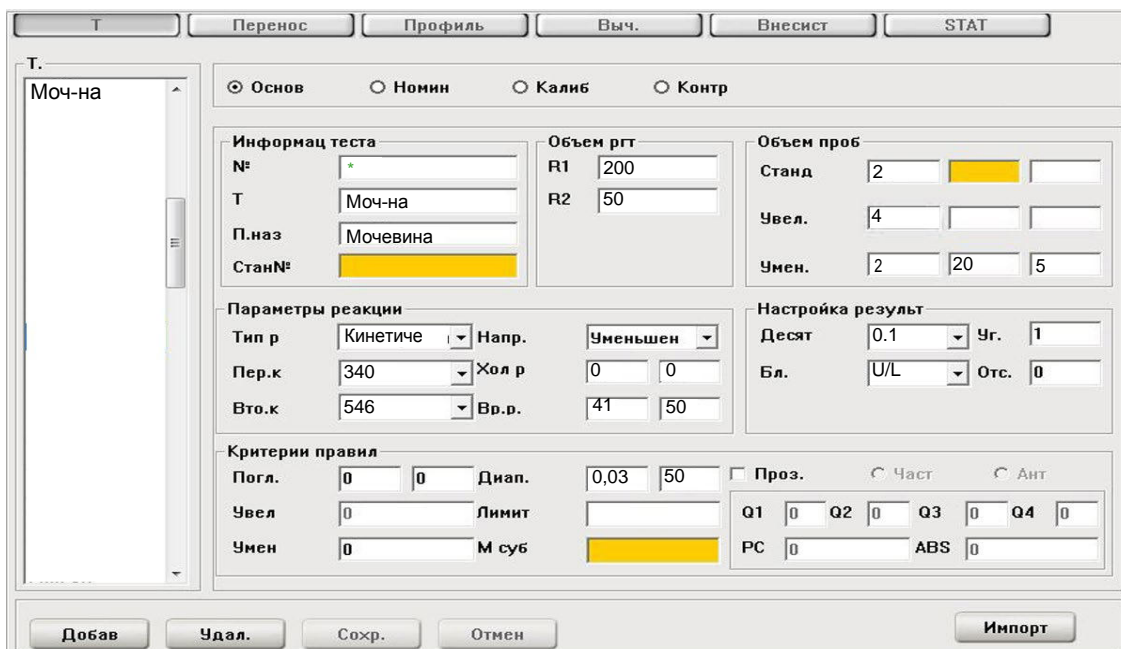

Т. Моч-на

Основ Номин Калиб Контр

Информация теста
 №: *
 Т: Моч-на
 П.наз: Мочевина
 Стан№:

Объем ргт
 R1: 200
 R2: 50

Объем проб
 Станд: 2
 Увел.: 4
 Умен.: 2 20 5

Параметры реакции
 Тип р: Кинетиче Напр.: Уменьшен
 Пер.к: 340 Хол р: 0 0
 Вто.к: 546 Вр.р.: 41 50


Настройка результ
 Десят: 0.1 Уг.: 1
 Бл.: U/L Отс.: 0

Критерии правил
 Погл.: 0 0 Диап.: 0,03 50
 Увел.: 0 Лимит:
 Умен.: 0 М суб:

Проз. Част Ант
 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0
 PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохран. Отмен Импорт

Монореагентное применение

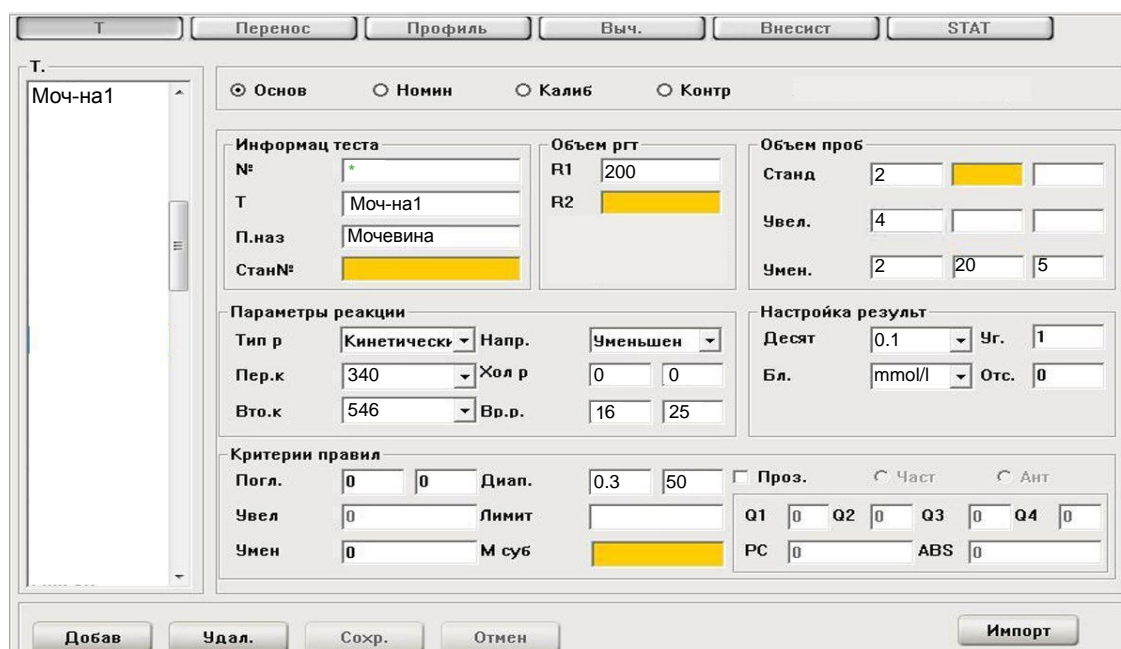

Т. Моч-на1

Основ Номин Калиб Контр

Информация теста
 №: *
 Т: Моч-на1
 П.наз: Мочевина
 Стан№:

Объем ргт
 R1: 200
 R2:

Объем проб
 Станд: 2
 Увел.: 4
 Умен.: 2 20 5

Параметры реакции
 Тип р: Кинетически Напр.: Уменьшен
 Пер.к: 340 Хол р: 0 0
 Вто.к: 546 Вр.р.: 16 25

Настройка результ
 Десят: 0.1 Уг.: 1
 Бл.: mmol/l Отс.: 0

Критерии правил
 Погл.: 0 0 Диап.: 0,3 50
 Увел.: 0 Лимит:
 Умен.: 0 М суб:


Проз. Част Ант
 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0
 PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохран. Отмен Импорт

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

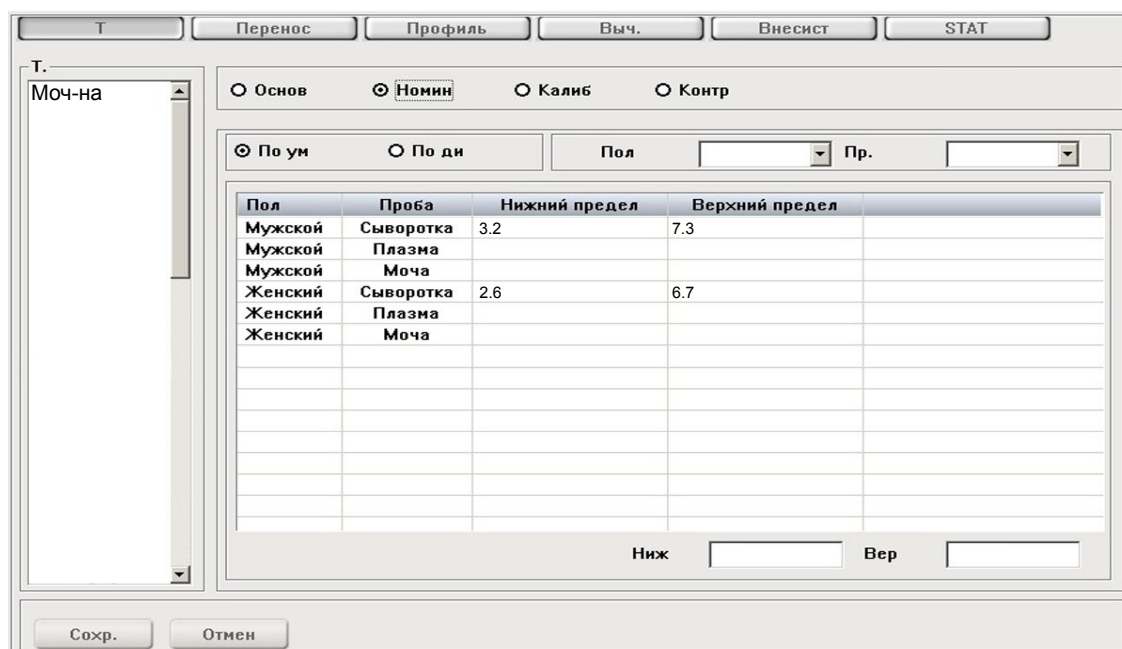

Т. Моч-на


Основ Номин Калиб Контр

По ум По ди

| Пол | Проба | Нижний предел | Верхний предел |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| Мужской | Сыворотка | 3.2 | 7.3 |
| Мужской | Плазма | | |
| Мужской | Моча | | |
| Женский | Сыворотка | 2.6 | 6.7 |
| Женский | Плазма | | |
| Женский | Моча | | |

Ниж Вер

Сохранить Отменить

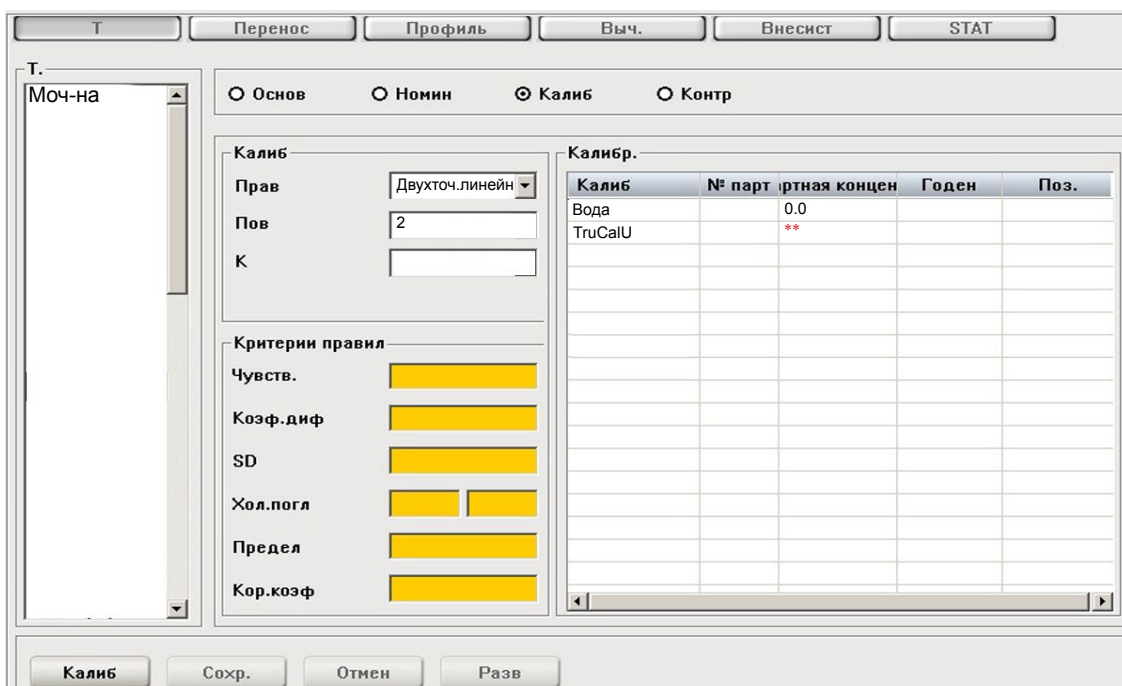

Т. Моч-на

Основ Номин Калиб Контр

Калиб

Прав

Пов

К

Критерии правил

Чувств.

Козф. диф

SD

Хол. погл

Предел

Кор. коэф

Калибр.

| Калиб | № парт | ртная концен | Годен | Поз. |
|---------|--------|--------------|-------|------|
| Вода | | 0.0 | | |
| TruCalU | | ** | | |

Калиб Сохранить Отменить Разв

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или стандарту из набора.
Контроль по TruLab N и TruLab P.

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно