

ЛПНП (липопротеины низкой плотности)

Select (прямой селективный)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

The screenshot shows the configuration window for the Lp(a) test. It includes fields for test information, reaction parameters, and criteria rules.

Информация теста		Объем ргг		Объем проб		
№	*	R1	200	Станд	2.2	
T	ЛПНП	R2	50	Увел.	4.4	
П.наз	ЛПНП			Умен.	3	35 3
Стан№						

Параметры реакции				Настройка результат			
Тип р	Контрольная	Напр.	Увеличен	Десят	0.01	Уг.	1
Пер.к	605	Хол р	32 34	Бл.	mmol/l	Отс.	0
Вто.к	700	Вр.р.	58 60				

Критерии правил				Проз.							
Погл.	0	0	Диап.	0.03	10.3	Част	Ант				
Увел	0	Лимит		Q1	0	Q2	0	Q3	0	Q4	0
Умен	0	М суб		PC	0	ABS	0				

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

The screenshot shows the 'Нормин' (Normal) tab of the configuration window. It displays a table with reference ranges for different samples and genders.

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	3.4
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	3.4
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: [] Вер: []

ЛПНП (липопротеины низкой плотности)

Select (прямой селективный)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

Т. ЛПНП

О Основ Нонин Калиб Контр

Калиб

Прав Двухточ.линейн

Пов 2

К

Критерии правил

Чувств. [Yellow bar]

Козф. диф [Yellow bar]

SD [Yellow bar]

Хол.погл [Yellow bar]

Предел [Yellow bar]

Кор.коэф [Yellow bar]

Калибр.

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruCalL		**		

Калиб Сохран. Отмен Разв

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: линейная (калибратор TruCal HDL/LDL).

Контроль по TruLab N и TruLab P, или по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.