

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
Трансф		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
Тест	Трансф	R1	250						
№	*	R2	50						
Полн.назв	Трансферрин	Объем проб	2						
№ станд.		R1 холост							
Тип реакц	Кон.точ.	Смеш.хол.реак							
Перв.крив	570	Диап.линейн.	0	8					
Втор.крив		Предел линейн.							
Направл.	Увеличен	Предел субстр.							
Вр.реакц	-1 -19	Козфф.							
Вр.инкуб.	14	Комп.	Наклон	1	Отс.	0			
Единица	g/L	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны							
Точн.	0.01	q1		q2		q3		q4	
		ПК		Пог					

Доб. Удалить ОК Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.


Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
Трансф		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок				
1	Муж	Сыворот		2	3.6				
2	Жен	Сыворот		2	3.6				

Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок

Доб. Удалить ОК Отмена

Доб. Удалить ОК Отмена

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

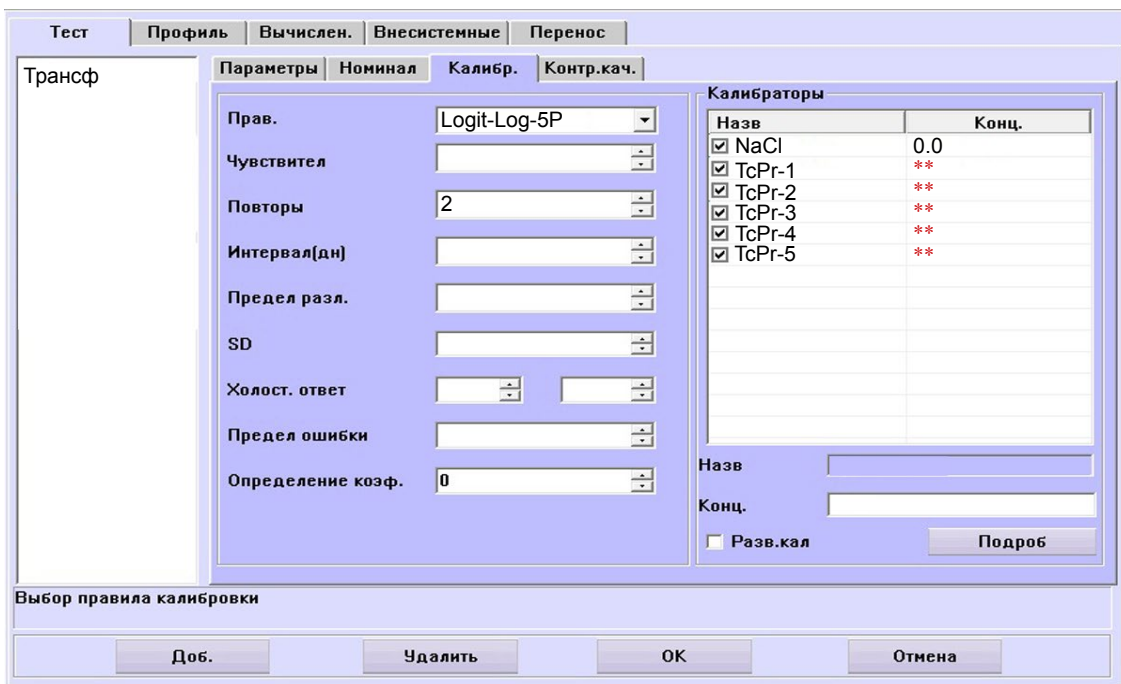

The screenshot shows a software window titled "Трансф" (Transferrin) with several tabs: "Тест", "Профиль", "Вычислен.", "Внесистемные", and "Перенос". The "Калибр." (Calibration) tab is active, showing various parameters and a list of calibrators.

Parameters:

- Прав.: Logit-Log-5P
- Чувствител.: [dropdown]
- Повторы: 2
- Интервал(дн): [dropdown]
- Предел разл.: [dropdown]
- SD: [dropdown]
- Холост. ответ: [dropdown]
- Предел ошибки: [dropdown]
- Определение коэф.: 0

Калибраторы (Calibrators):

Назв.	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-5	**

Buttons: Доб., Удалить, ОК, Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.