

Цистатин-С

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры анализа

| | | | | | |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--------------|
| Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные |
| № | | Анализ | Сус-С | Тип | Фиксир.время |
| Единицы | mg/L | Точность | 0 | Перв.крив | 510 |
| Об. пробы. | 3 | Об. R1. | 270 | Об. R2. | 90 |
| Время инк. | 15 | Антиген | <input type="checkbox"/> Пров.антиг. | Ответ | |
| Время р | 3 — 25 | Субстрат | 0 | Н.предел | 0 |
| R1 холост | | Смеш. хол.реаг. | | В.предел | 0 |
| Н.предел | 0 | Н.предел | 0 | Линейность | |
| В.предел | 0 | В.предел | 0 | Н.предел | 0,08 |
| | | | | В.предел | 8 |
| | | | | Полн.назв. | Цистатин-С |
| | | | | № печати | * |

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Параметры

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----|---------|--------------------|-----------|------------|------------|
| Анализ | Сус-С | ← | → | Проба | Сыворотка | Пол | Муж. |
| Возраст | | | | Нормальн. диапазон | | | |
| № | Пол | Лет | Месяцев | Лет | Месяцев | Ниж.предел | Вер.предел |
| <input type="checkbox"/> 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | По умолчанию | | | | | 0,53 | 1,02 |

Цистатин-С

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры Номин.диапаз Вычислен. Профиль Перенос Внеисстемные

Анализ Проба Пол

Возраст Нормальн. диапазон

| № | Пол | Лет | Месяцев | Лет | Месяцев | Ниж.предел | Вер.предел |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="checkbox"/> 2 | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="checkbox"/> 3 | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="checkbox"/> 4 | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="checkbox"/> 5 | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="checkbox"/> 6 | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | По умолчанию | | | | | <input type="text" value="0,53"/> | <input type="text" value="1,02"/> |

Правило

Метод

Коэфф.К

Экземпляры

Интервал

Чувствительность

Определение коэффициента

Предел ошиб. для повт. обраб.

Холостой ответ

Предел различий

SD

Калибраторы

| Выбрано | Калибратор | № партии | Годен до | Уровень |
|-------------------------------------|------------|----------|------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | СусС-5 | ** | ** | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> | СусС-4 | ** | ** | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> | СусС-3 | ** | ** | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> | СусС-2 | ** | ** | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> | СусС-1 | ** | ** | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NaCl_0,9% | 000 | 2020-01-01 | 0 |

Выбор Выбрано Просрочен

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Лог-лог5р, (сплайн) 6 точек (набор стандартов TruCal Cystatin C, 5 уровней + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab Cystatin C уровень 1 и уровень 2.