



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

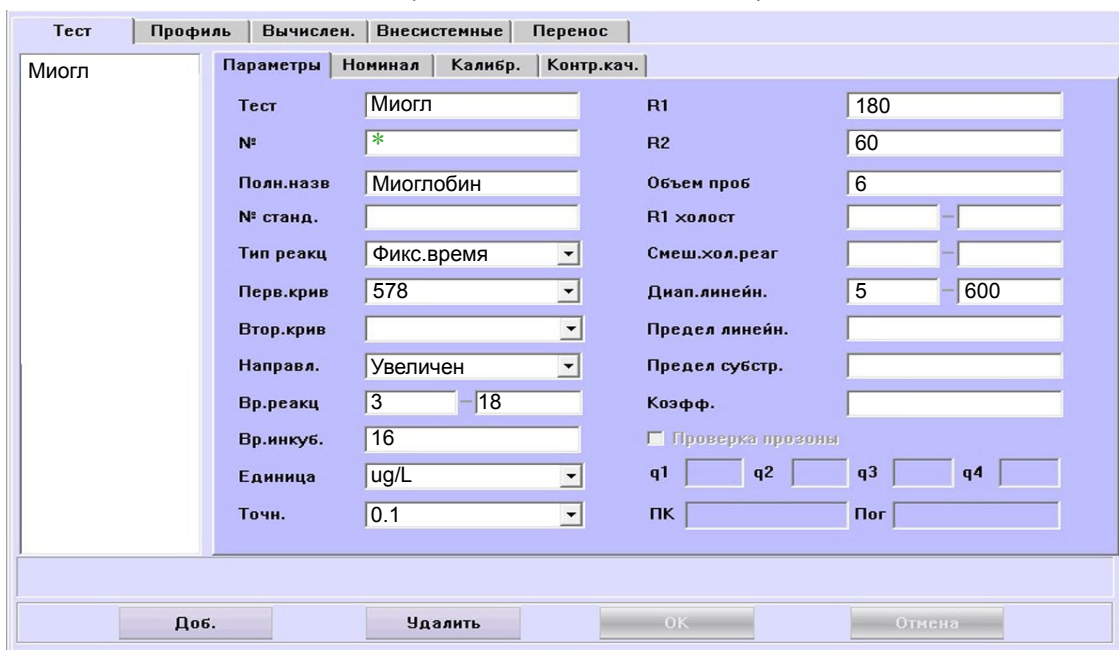

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

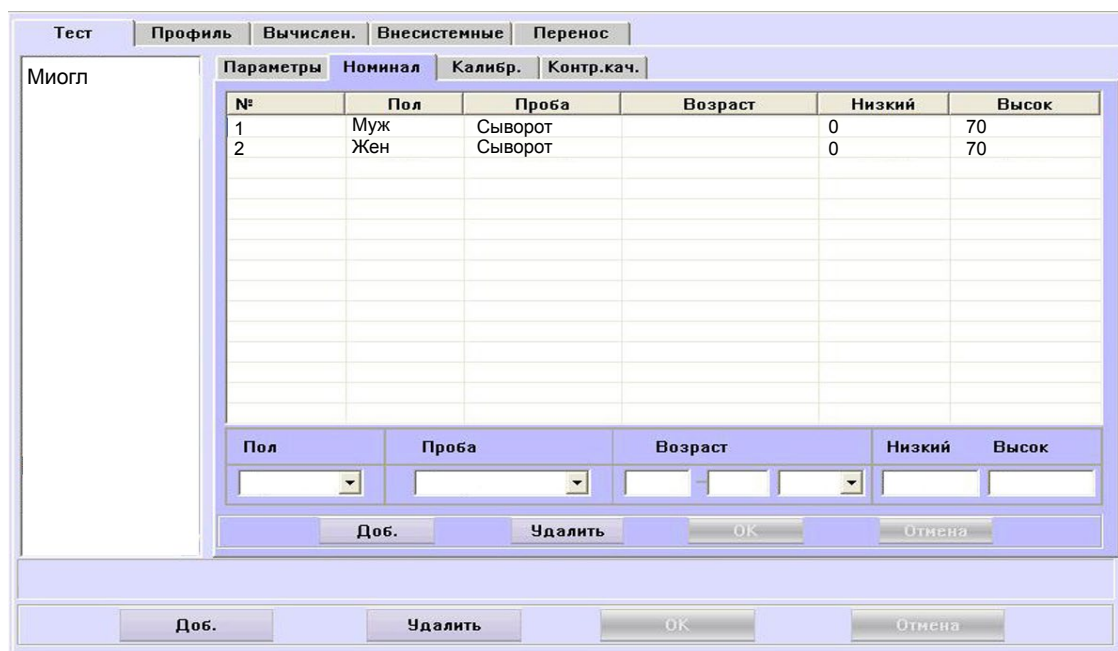

| № | Пол | Проба | Возраст | Низкий | Высокий |
|---|-----|---------|---------|--------|---------|
| 1 | Муж | Сыворот | | 0 | 70 |
| 2 | Жен | Сыворот | | 0 | 70 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

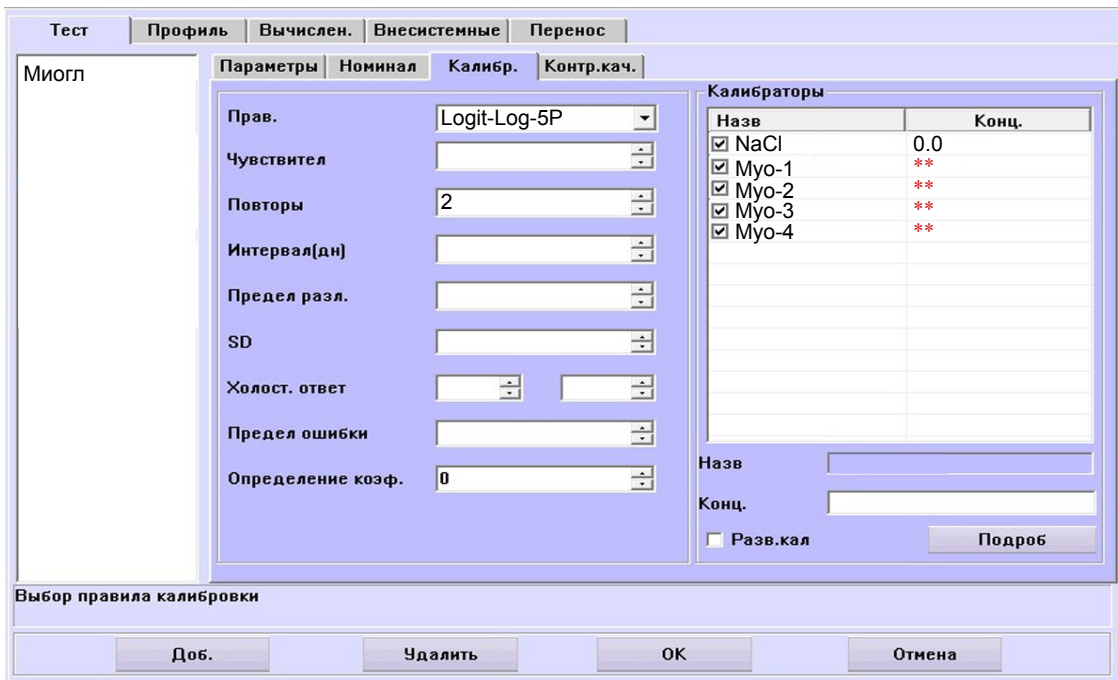

Миогл

Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

| Назв | Конц. |
|---|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> NaCl | 0.0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Myo-1 | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> Myo-2 | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> Myo-3 | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> Myo-4 | ** |

Назв

Конц.

Разв.кал

Подробнее

Выбор правила калибровки

Доб. Удалить ОК Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: Лог-лог5р, (сплайн) 5 точек (набор стандартов TruCal Myoglobin, 4 уровня + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.