

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры анализа

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

№	Анализ: UIBC	Тип: Конеч.точка	Реакция: Восходящий
Единицы: umol/l	Точность: 1	Перв.крив: 570	Втор.крив: 700
Об. пробы: 14.5	Об. R1: 180	Об. R2: 45	Лин. преде: 0
Время инк.: 15	Антиген: <input type="checkbox"/> Пров.антиг.	Ответ	Объем проб: 0
Время р: -1 — 25	Субстрат: 0	Н.предел: 0	Отношение: 0
R1 холост	Смеш. хол.реаг.	В.предел: 0	Полн.назв.: НЖСС
Н.предел: 0	Н.предел: 0	Линейность	№ печати: *
В.предел: 0	В.предел: 0	Н.предел: 1	
		В.предел: 135	

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

Анализ: **UIBC** Проба: **Сыворотка** Пол: **Муж.**

№	Пол	Возраст		Нормальн. диапазон		Ниж.предел	Вер.предел
		Лет	Месяцев	Лет	Месяцев		
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					21	84

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры		Номин.диапаз		Вычислен.		Профиль		Перенос		Внесистемные	
Анализ	UIBC							Проба	Сыворотка	Пол	
										Жен.	
						Возраст			Нормальн. диапазон		
№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел				
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0				
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					21	84				

Правило				Калибраторы				
Метод	Лин.(двухточ.)			Выбрано	Калибратор	№ партии	Годен до	Уровень
Коэфф.К	0			<input checked="" type="checkbox"/>	TruCalU	**	**	**
Экземпляры	2			<input checked="" type="checkbox"/>	Water	000	2020-01-01	0
Интервал	0							
Чувствительность	0							
Определение коэффициента	0							
	Предел ошиб. для повт. обраб.							
	Холостой ответ							
	Предел различий							
	SD							
				<input type="checkbox"/> Выбор <input checked="" type="checkbox"/> Выбрано <input type="checkbox"/> Просрочен				

******-вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).

Контроль по TruLab N.