

Прямой билирубин

ДСА (метод с дихлоранилином (ДХА))



Параметры для ввода в программу анализатора Numastar-600

Тип реакции **КОНЕЧНАЯ ТОЧКА**

| | | | | | |
|-------------|--|----------|--|----------|--------------------------------|
| Метод | <input type="text" value="BiID"/> | Название | <input type="text" value="Прям. билирубин"/> | Маркир. | <input type="text"/> |
| Тип образца | <input type="text" value="Сыворотка"/> | Ед. | <input type="text" value="мкмоль/л"/> | Десят-ые | <input type="text" value="1"/> |
| Штрих-код | <input type="text"/> | Версия | <input type="text"/> | | |

Главное меню Количественный Ограничения Контр.класс Перемещенный вперед

| | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Длина волны (нм) | | Считываемые показатели | |
| Главное меню | <input type="text" value="550"/> | Время (сек) | <input type="text" value="300"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Боковой | <input type="text" value="650"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Доп. точность | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Подача | | | | | |
| Изделие | Объем (мкл) | Время (сек) | Разлить при помощи | Доп. объем (м KitVol (ul)) | |
| Образец | <input type="text" value="18"/> | <input type="text" value="60"/> | | | |
| 1-й реагент | <input type="text" value="180"/> | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Дополнитель | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="0"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2-й реагент | <input type="text" value="45"/> | <input type="text" value="240"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Дополнитель | <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="checkbox"/> 3-й реагент | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Разбавитель образца | | <input type="checkbox"/> Предварительное разбавл | |
| <input type="text" value="Вода"/> | <input type="checkbox"/> Используйте дополн | Фактор | Инкубация |
| <input type="text" value="DIL"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="0"/> |

Главное меню Количественный Ограничения Контр.класс Перемещенный вперед

| | | | |
|---|--|---|--|
| Преобразование единиц | | Тип калибровки | |
| Фактор | <input type="text" value="1.0000"/> | <input checked="" type="radio"/> Кривая/линейная | |
| Смещение | <input type="text" value="0.0000"/> | <input type="checkbox"/> Время действительности (μ) | <input type="text" value="15"/> |
| Направление | <input type="text" value="По восходящей"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Фиксированные точки | <input type="text" value="2"/> |
| <input type="checkbox"/> Проверка направления | | Обязательная формула | <input type="text" value="Линейный"/> |
| | | <input type="radio"/> Фактор | Фактор <input type="text" value="1.0000"/> |
| | | <input type="radio"/> Используйте из данной мето | <input type="text" value="12"/> |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Бланк реагента | | | |
| <input type="checkbox"/> Введено в действие | | | |
| Замена образа при помощи | Время действитель | | |
| <input type="text" value="Разбавитель"/> | <input type="text" value="DIL"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="Часы"/> |
| Копии по умолчанию | <input type="text" value="1"/> | <input type="checkbox"/> Выполнен автоматически | |

Параметры для ввода в программу анализатора Numastar-600

Главное меню Количественный **Ограничения** Контр.класс Перемещенный вперед

| | | | |
|---|--------|---|---|
| Пределы действительности концентрации | | Автоматическое утверждение бланка реагента | |
| Низкий | 1.7 | Больше образ | <input type="checkbox"/> Нижн. пред. 0.0000 |
| Высокий | 170 | Меньше образ | <input type="checkbox"/> Верхний пред. 0.0000 |
| Проверка целостности ограничений абсорбции | | Автоматический прием фактора калибровки | |
| <input type="checkbox"/> Нижн. пред. | 0.0000 | <input type="checkbox"/> Нижн. пред. | 0.0000 |
| <input type="checkbox"/> Верхний пред. | 0.0000 | <input type="checkbox"/> Верхний пред. | 0.0000 |
| Пределы дублирования концентрации | | <input type="checkbox"/> % замены 0.0000 | |
| <input type="checkbox"/> Нижн. пред. | 0.0000 | | |
| <input type="checkbox"/> Верхний пред. | 0.0000 | | |

Главное меню Количественный **Ограничения** Контр.класс Перемещенный вперед

| Идентиф. | Низкий | Высокий |
|----------|--------|---------|
| Female | 0 | 3.4 |
| Male | 0 | 3.4 |

Для страниц «Перемещенный вперед» и «Замена» оставить значения по умолчанию.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.