

C-Реактивный белок (Uhs-универсальный)

ImmunoTD Uhs for U (Иммунотурбодиметрический с латексом, универсальный)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры анализа

| | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|
| № | Анализ | Тип | Реакция |
| Единицы | Точность | Перв.крив | Втор.крив |
| Об. пробы. | Об. R1. | Об. R2. | Лин. преде |
| Время инк. | Антиген | Ответ | Объем проб |
| Время р | Субстрат | Н.предел | Отношение |
| R1 холост | Смеш. хол.реаг. | Линейность | Полн.назв. |
| Н.предел | Н.предел | Н.предел | № печати |
| В.предел | В.предел | В.предел | |

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Параметры

Анализ: CRP U Проба: Сыворотка Пол: Муж.

| № | Пол | Возраст | | Нормальн. диапазон | |
|-------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|------------|
| | | Лет | Месяцев | Ниж.предел | Вер.предел |
| <input type="checkbox"/> 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | По умолчанию | | | 0 | 5 |

C-Реактивный белок (Uhs-универсальный)

ImmunoTD Uhs for U(Иммунотурбодиметрический с латексом, универсальный)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

Анализ: CRP U Проба: Сыворотка Пол: Жен.

| № | Пол | Возраст | | Нормальн. диапазон | |
|-------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|------------|
| | | Лет | Месяцев | Ниж.предел | Вер.предел |
| <input type="checkbox"/> 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | По умолчанию | 0 | | 0 | 5 |

Правило

Метод: Logistic 5P

Коэфф.К: 0

Экземпляры: 2

Интервал: 0

Чувствительность: 0

Определение коэффициента: 0

Предел ошиб. для повт. обраб.: 0

Холостой ответ: 0 0

Предел различий: 0

SD: 0

Калибраторы

| Выбрано | Калибратор | № партии | Годен до | Уровень |
|-------------------------------------|------------|----------|------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CRPhs-5 | ** | ** | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CRPhs-4 | ** | ** | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CRPhs-3 | ** | ** | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CRPhs-2 | ** | ** | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CRPhs-1 | ** | ** | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NaCl_0,9% | 000 | 2020-01-01 | 0 |

Выбор Выбрано Просрочен

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Лог-лог5р, (сплайн) 6 точек (набор стандартов TruCal CRP-U 5 уровней + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или TruLab CRP уровень 1 и уровень 2.