



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

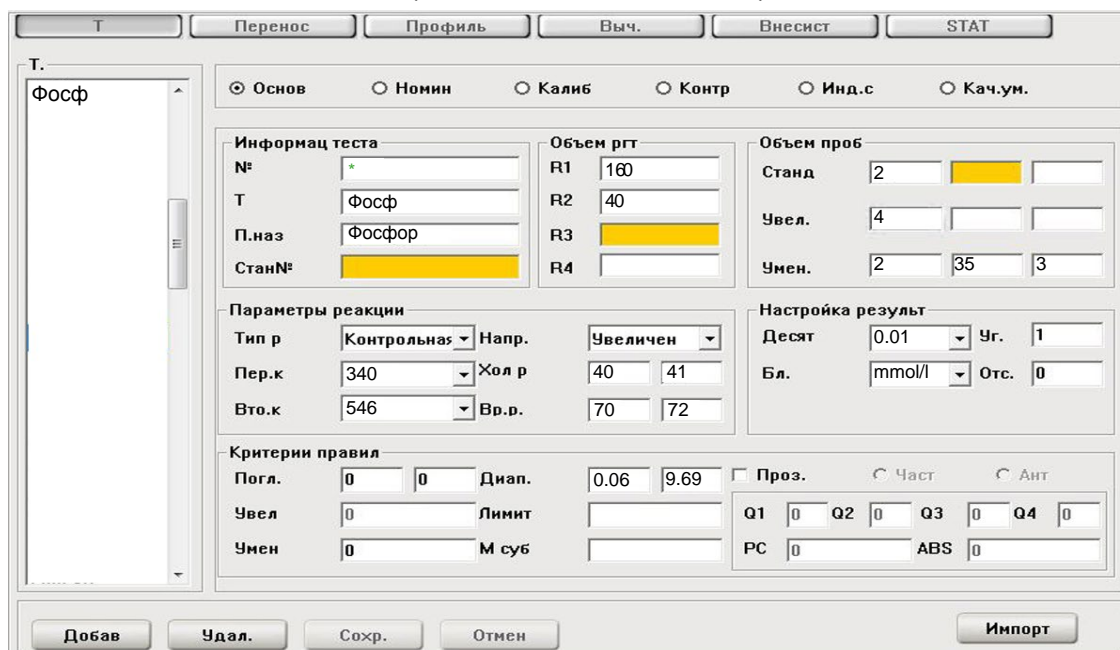

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

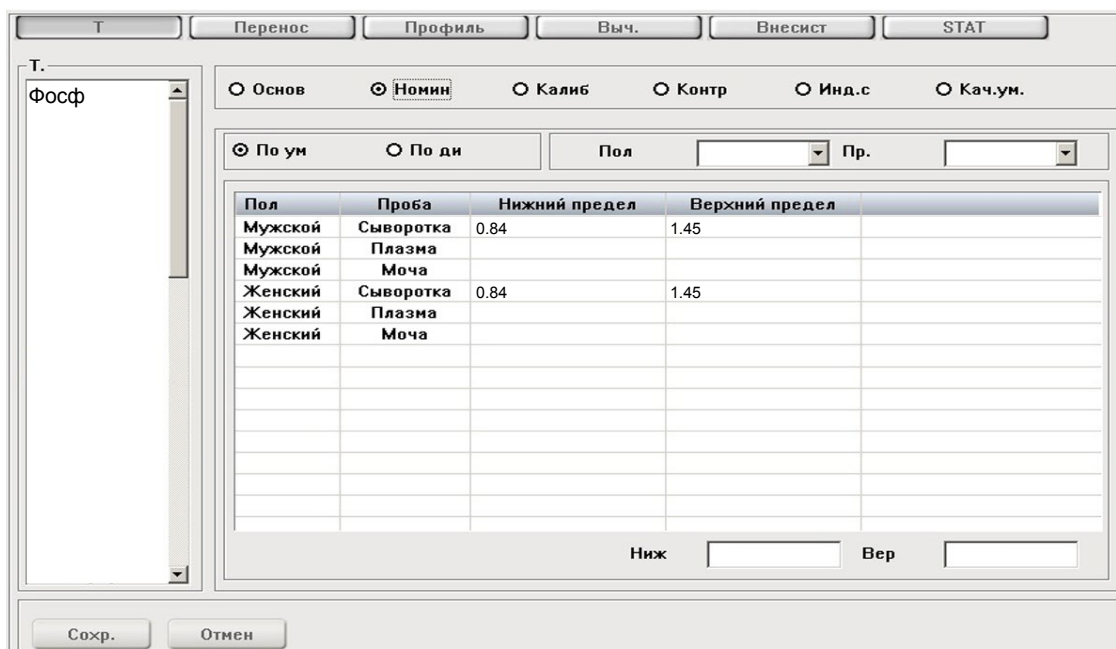

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0.84	1.45
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0.84	1.45
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

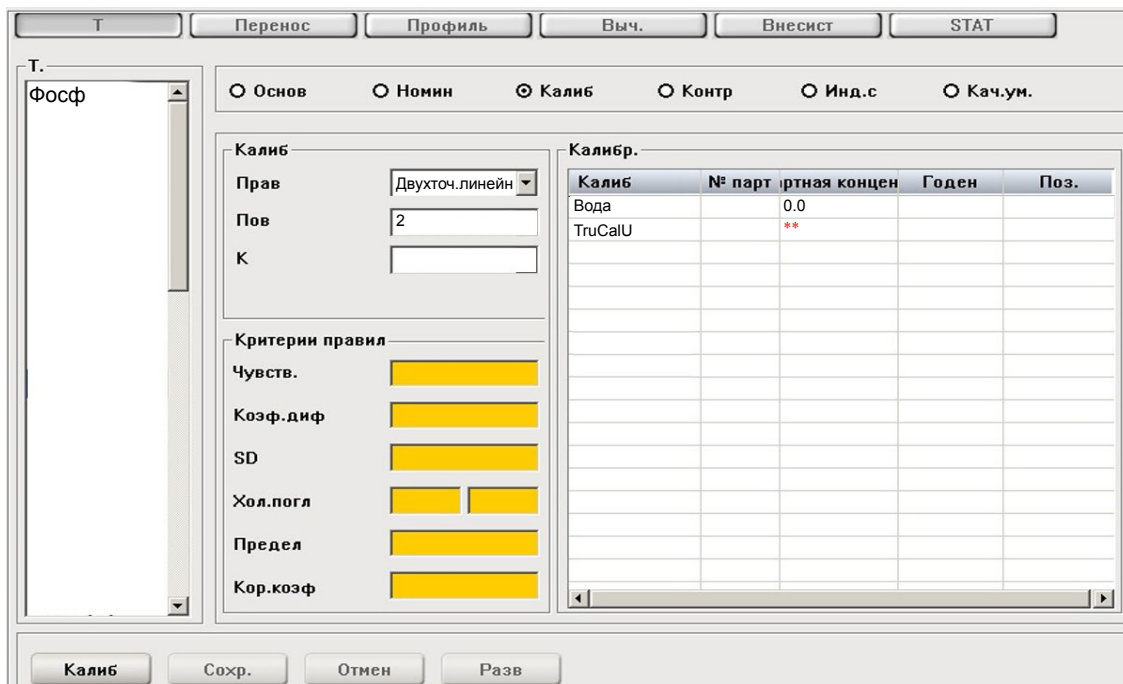

Т. Фосф

Основ
 Нонин
 Калиб
 Контр
 Инд.с
 Кач.ум.

Калиб

Прав: Двухточ.линейн

Пов: 2

К:

Критерии правил

Чувств. [Yellow bar]

Козф. диф [Yellow bar]

SD [Yellow bar]

Хол. погл [Yellow bar]

Предел [Yellow bar]

Кор. коэф [Yellow bar]

Калибр.

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеп	Поз.
Вода		0.0		
TruCalU		**		

Калиб Сохранить Отмена Разрыв

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или стандарту из набора.
Контроль по TruLab N и TruLab P.

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно