

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан для венозной плазмы в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка		
Мужской	Плазма	0.5	2.2
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка		
Женский	Плазма	0.5	2.2
Женский	Моча		

# Лактат

LDH UV (ферментативный метод с ЛДГ)



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
Вода		0.0		
TruCalU		**		

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).

Контроль по TruLab N и TruLab P.

Лактат определяется в плазме, но калибровать можно по сывороточному калибратору TruCal U