


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

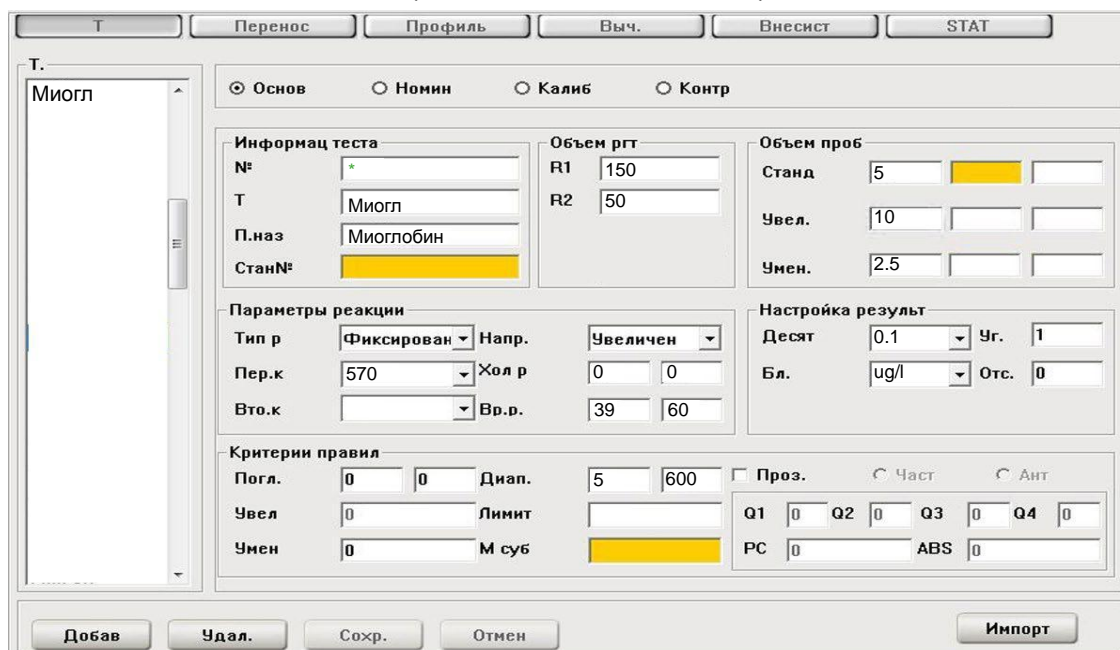

Т. Миогл

Основ Номин Калиб Контр

Информация теста

№: *
 Т: Миогл
 П.наз: Миоглобин
 Стан№: *

Объем ргг

R1: 150
 R2: 50

Объем проб

Станд: 5
 Увел.: 10
 Умен.: 2.5

Параметры реакции

Тип р: Фиксирован Напр.: Увеличен
 Пер.к: 570 Хол р: 0 0
 Вто.к: Вр.р.: 39 60

Настройка результат

Десят: 0.1 Уг.: 1
 Бл.: ug/l Отс.: 0

Критерии правил

Погл.: 0 0 Диап.: 5 600 Проз.: Част Ант
 Увел.: 0 Лимит:
 Умен.: 0 М суб: *


Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0
 PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

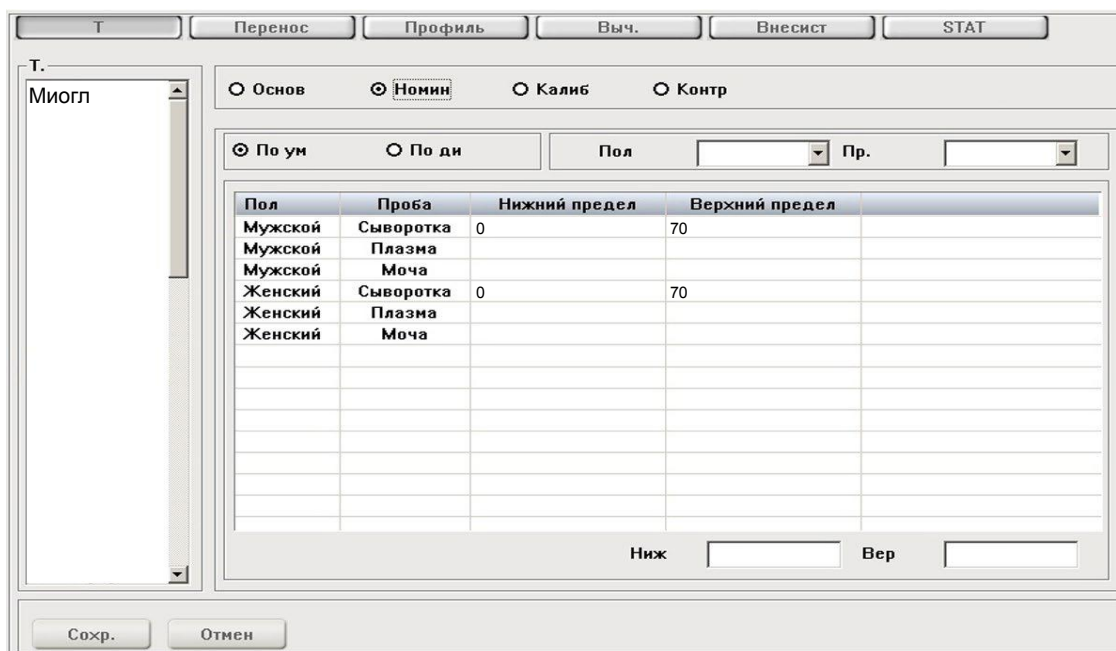

Т. Миогл

Основ **Номин** Калиб Контр


По ум По дн Пол: Пр.:

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	70
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	70
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

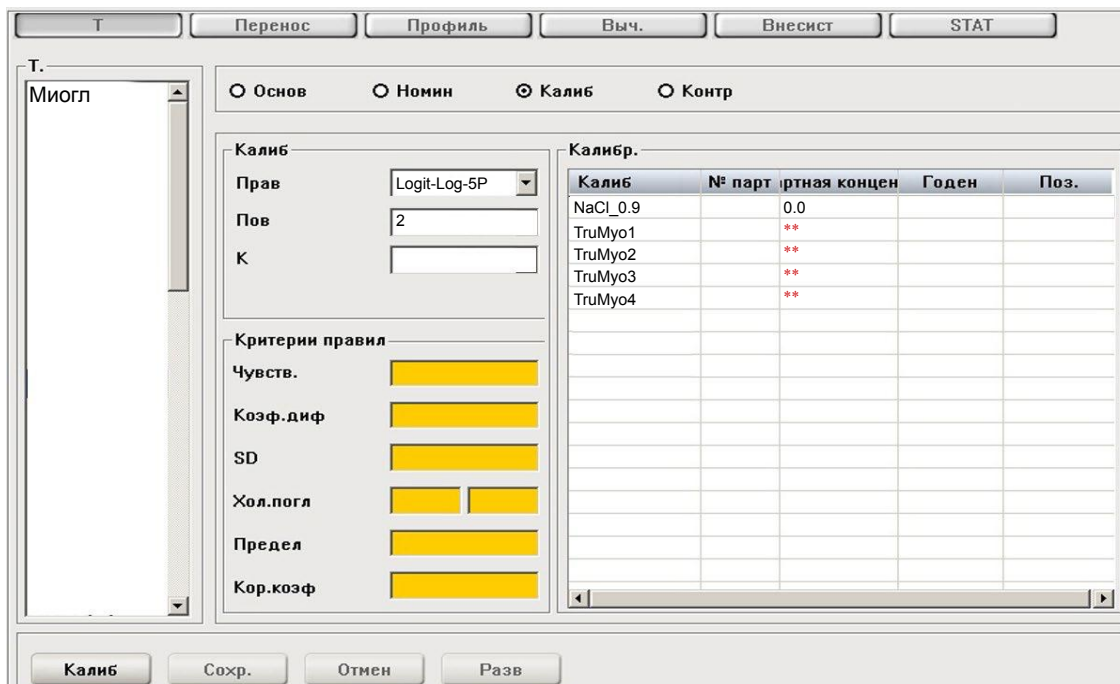

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruMyo1		**		
TruMyo2		**		
TruMyo3		**		
TruMyo4		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 5 точек, набор стандартов TruCal Myoglobin, 4 уровня + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.