

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120 (биреагент)

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
аАми		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
Тест	аАми	R1	180						
№	*	R2	45						
Полн.назв	а-Амилаза	Объем проб	3.5						
№ станд.		R1 холост							
Тип реакц	Кинетич	Смеш.хол.реаг							
Перв.крив	405	Диап.линейн.	0	2000					
Втор.крив	546	Предел линейн.							
Направл.	Увеличен	Предел субстр.	20000						
Вр.реакц	10 - 17	Козэфф.							
Вр.инкуб.	16	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны							
Единица	U/L	q1		q2		q3		q4	
Точн.	Целое	ПК		Пог					

Доб.      Удалить      ОК      Отмена

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120 (монореагент)

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
аАми1		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
Тест	аАми1	R1	200						
№	*	R2	0						
Полн.назв	а-Амилаза	Объем проб	4						
№ станд.		R1 холост							
Тип реакц	Кинетич	Смеш.хол.реаг							
Перв.крив	405	Диап.линейн.	0	2000					
Втор.крив	546	Предел линейн.							
Направл.	Увеличен	Предел субстр.							
Вр.реакц	9 - 17	Козэфф.							
Вр.инкуб.		<input type="checkbox"/> Проверка прозоны							
Единица	U/L	q1		q2		q3		q4	
Точн.	Целое	ПК		Пог					


Доб.      Удалить      ОК      Отмена

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

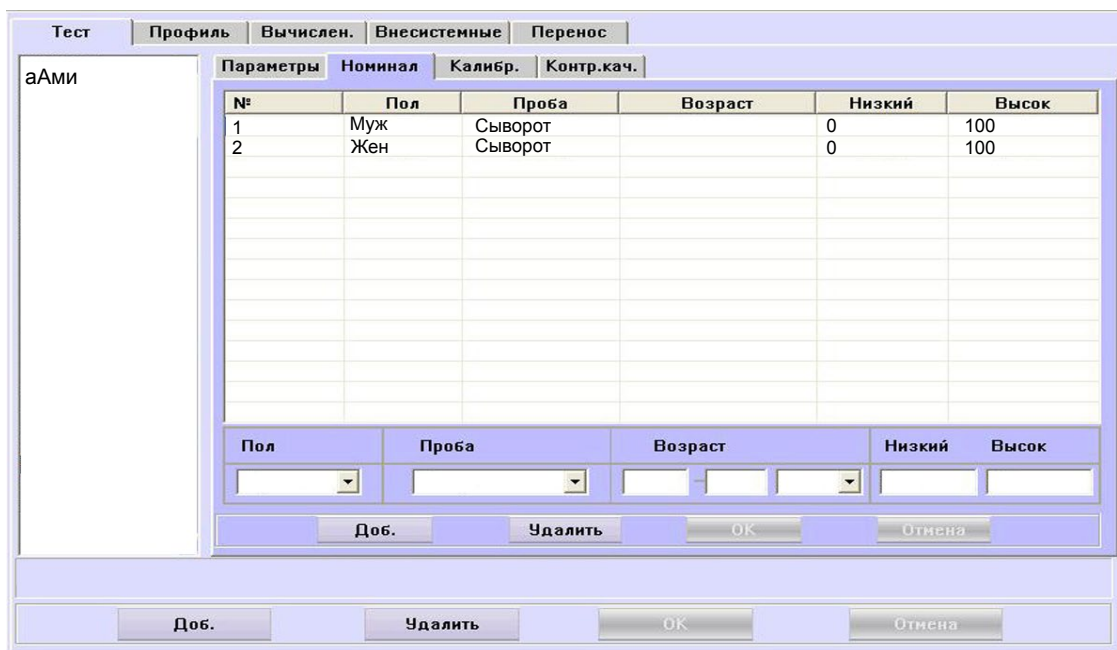

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	100
2	Жен	Сыворот		0	100

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно

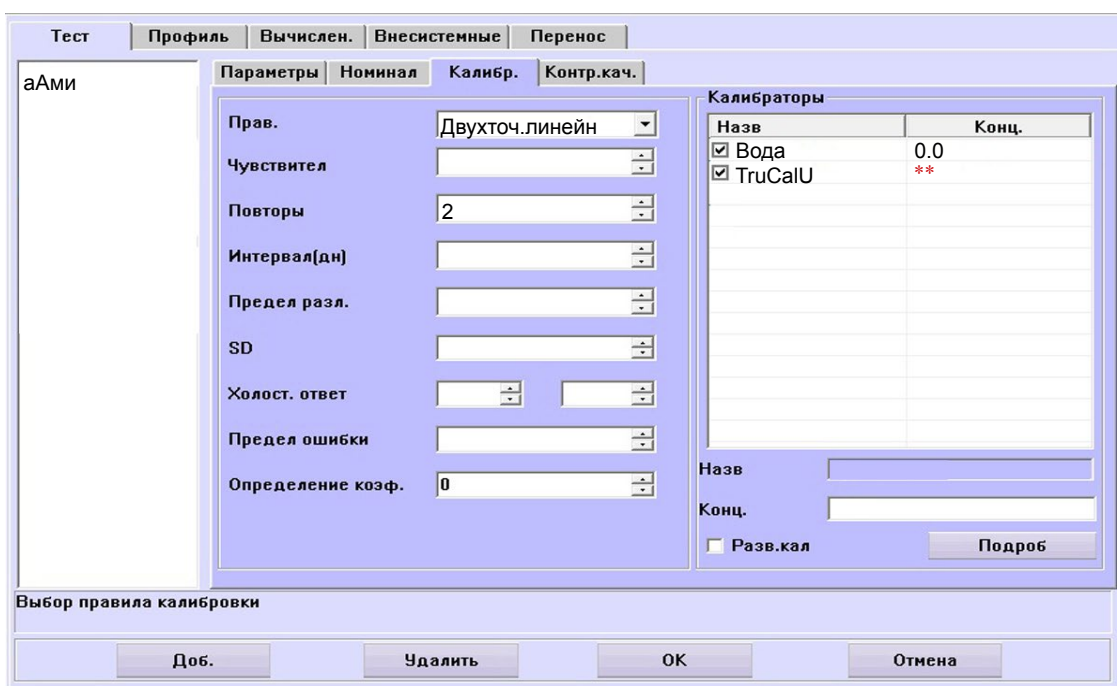

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.