


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

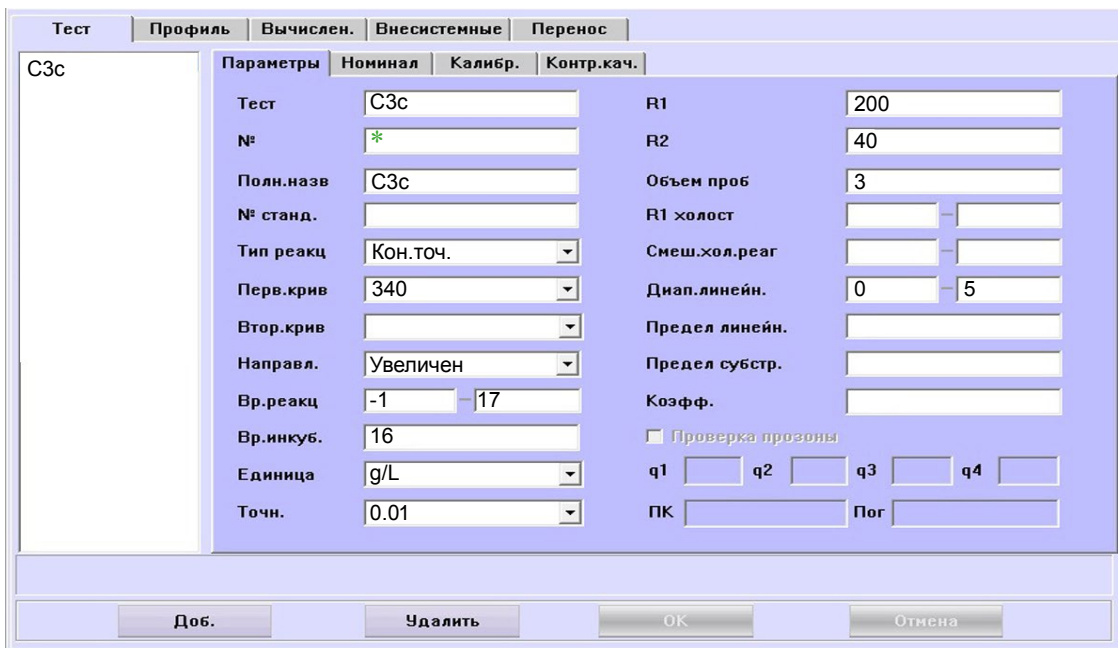

Тест: СЗс

Параметры: Номинал, Калибр., Контр.кач.

Тест: СЗс R1: 200

№: * R2: 40

Полн.назв: СЗс Объем проб: 3

№ станд.: R1 холост: -

Тип реакц: Кон.точ. Смеш.хол.реаг: -

Перв.крив: 340 Диап.линейн.: 0 - 5

Втор.крив: Предел линейн.:

Направл.: Увеличен Предел субстр.:

Вр.реакц: -1 -17 Коэфф.:

Вр.инкуб.: 16 Проверка прозоны

Единица: g/L q1: q2: q3: q4:


Точн.: 0.01 ПК: Погр:

Доб. Удалить ОК Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

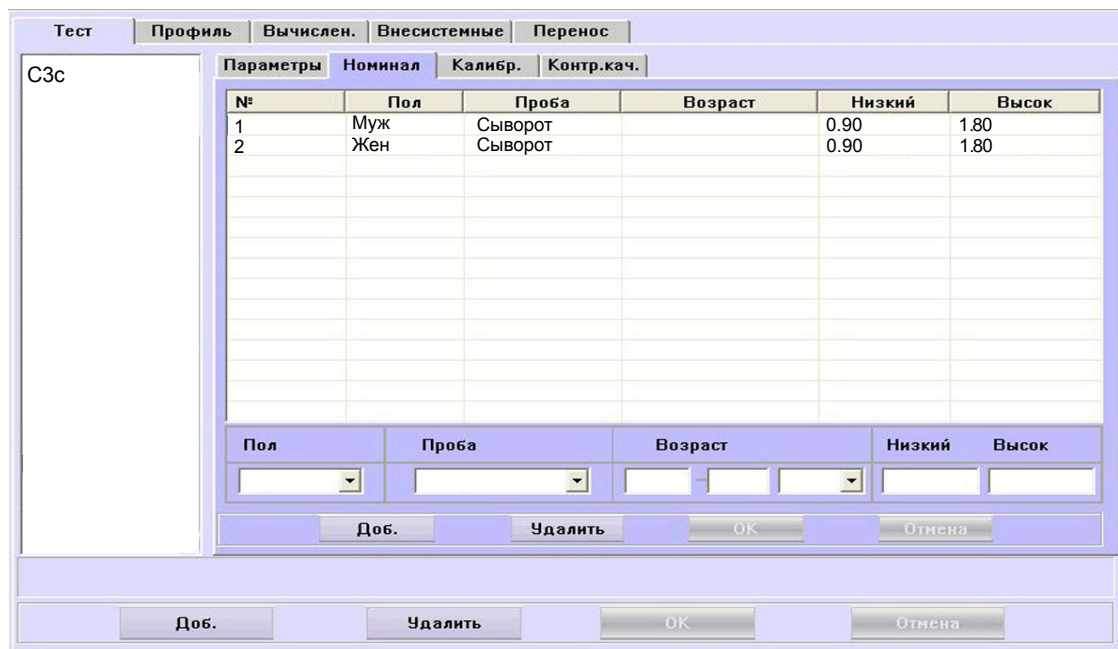

Тест: СЗс

Параметры: Номинал, Калибр., Контр.кач.


№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0.90	1.80
2	Жен	Сыворот		0.90	1.80

Пол: Проба: Возраст: Низкий: Высок:

Доб. Удалить ОК Отмена

Доб. Удалить ОК Отмена

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

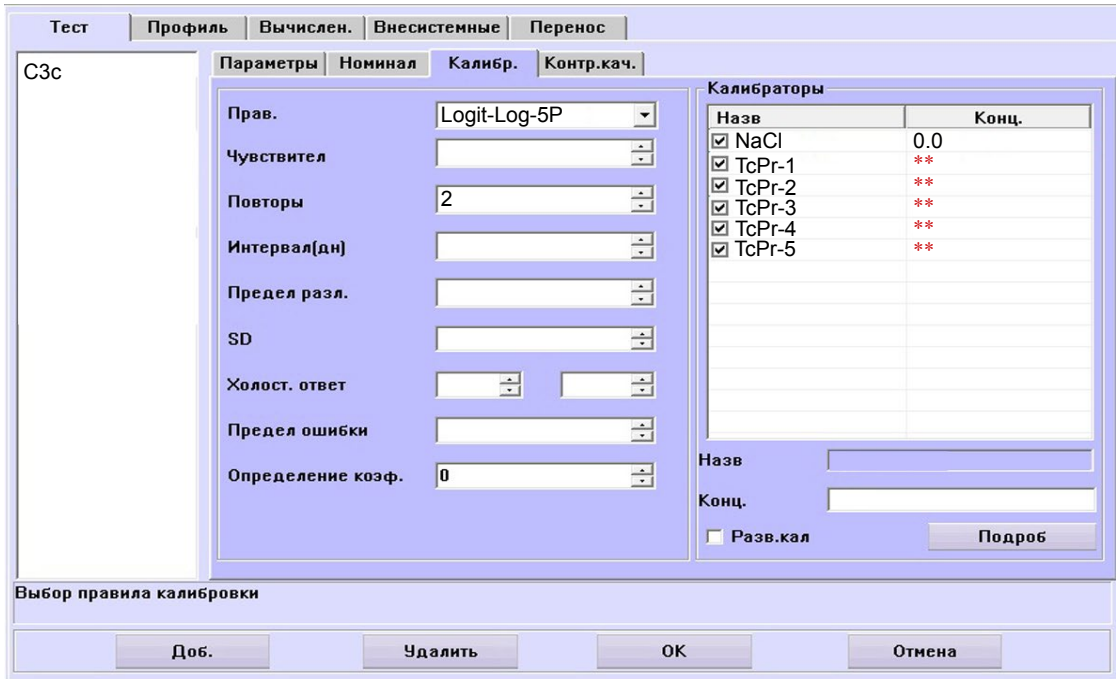

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-5	**

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.