

Общий белок в моче

Pyrogallol red (метод с пирогалловым красным)



Параметры для ввода в программу анализатора Numastar-600

Тип реакции **КОНЕЧНАЯ ТОЧКА**

Метод	TP-Urea	Название	Белок мочи	Маркир.	
Тип образца	Моча	Ед.	мг/л	Десят-ые	0
Штрих-код		Версия			

Главное меню Количественный Ограничения Контр.класс Перемещенный вперед

Длина волны (нм)		Считываемые показатели	
Главное меню	590	Время (сек)	300
<input type="checkbox"/> Боковой		<input checked="" type="checkbox"/> Доп. точность	

Подача					
Изделие	Объем (мкл)	Время (сек)	Разлить при помощи	Доп. объем (м KitVol (ul))	
Образец	4	60			
1-й реагент	180	0	<input checked="" type="checkbox"/> Дополнитель	10	0
<input type="checkbox"/> 2-й реагент					
<input type="checkbox"/> 3-й реагент					

Разбавитель образца		<input type="checkbox"/> Предварительное разбав	
Вода	<input type="checkbox"/> Используйте дополн	Фактор	Инкубация
DIL	0	1	0

Главное меню Количественный Ограничения Контр.класс Перемещенный вперед

Преобразование единиц		Тип калибровки	
Фактор	1.0000	<input checked="" type="radio"/> Кривая/линейная	
Смещение	0.0000	<input type="checkbox"/> Время действительности (μ)	15
Направление	По восходящей	<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированные точки	2
<input type="checkbox"/> Проверка направления		Обязательная формула	Линейный
		<input type="radio"/> Фактор	Фактор 1.0000
		<input type="radio"/> Используйте из данной мето	12

Бланк реагента			
<input checked="" type="checkbox"/> Введено в действие			
Замена образца при помощи	Время действитель		
Реагент	1	1	Дни
Копии по умолчанию	1	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнен автоматически	

Общий белок в моче

Pyrogallol red (метод с пирогаллоловым красным)



Параметры для ввода в программу анализатора Numastar-600

Главное меню | Количественный | **Ограничения** | Контр.класс | Перемещенный вперед

Пределы действительности концентрации
Низкий: 20 (Больше образ)
Высокий: 3000 (Меньше образ)

Автоматическое утверждение бланка реагента
 Нижн. пред.: 0.0000
 Верхний пред.: 0.0000

Проверка целостности ограничений абсорбции
 Нижн. пред.: 0.0000
 Верхний пред.: 0.0000

Автоматический прием фактора калибровки
 Нижн. пред.: 0.0000
 Верхний пред.: 0.0000
 % замены: 0.0000

Пределы дублирования концентрации
 Нижн. пред.: 0.0000
 Верхний пред.: 0.0000

Главное меню | Количественный | **Ограничения** | Контр.класс | Перемещенный вперед

Идентиф.	Низкий	Высокий
Female	24	141
Male	24	141

Для страниц «Перемещенный вперед» и «Замена» оставить значения по умолчанию.

Диапазон нормальных значений указан для суточной мочи. При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно