

ASLO, Антистрептолизин-О

ImmunoTD (Иммунотурбодиметрический)

Параметры теста для Indiko

Название теста:	ASLO_d				
Полн.назв.	АСЛО				
Сетев. имя	***				
Тип:	Фотометр	Кол.знаков	1		
В Работе	Да/Нет	Поправ. коэф.	1		
Подтвержд	Автоматич	Поправ. смещ.	0		
Един.Измер	МЕ/мл				
Тип образца	Сыворотка				
Процесс					
Тип бланка	нет	Первич. Развед 1+	0		
Реагент	ASLO_d1	Объем мкл	165	Дозир. с	Экстра
		Доп. объем	10	Скор шприца	Норм
Образец		Объем мкл	2	Дозир с	экстра
		Доп. объем	8	Доп. промыв	Нет
Инкубация		Время сек	180	Факт время сек	***
Реагент	ASLO_d2	Объем мкл	33	Дозир. с	Экстра
		Доп. объем	8	Скор шприца	Норм
Инкубация		Время сек	40		
Кинетика		Осн. длина волны нм	540	Доп. длина волны нм	*
		Направление реакции	Возрастание	Тип измерения	Линейный
		Нелинейность (МА/мин)	0	Нелинейность %	25
		Время измерения, с	180	точек	Мах возможн
		Факт время сек	***	Проверка скорости	Нет
Разведение					
Развести	Вода	Первич. Развед 1+	0		
Пределы					
	Диапазон измерений		Степень разведения (1+)		
	Мин	Макс		Низ	Верх
Первичное развед.	*	800	→	*	5
Предел теста	*	4800	МЕ/мл		
Критич предел	*	*	МЕ/мл		
Нач. абс.	0	2.5	А		
Первичн. развед	0				
Рефер. диапазоны	Мин. значение		Макс. значение		
общие	0		200		
Муж	0		200		
Жен	0		200		
Калибровка					
Тип калибровки	Линейный	Абс ошибка	*		
Периодичность дни	99	Отн ошибка	*		
Точки/калибратор	Две.	Мин предел фактор	*		
Подтверждение	Вручную	Макс предел Фактор	*		

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal ASLO, 5 уровней + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.