

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры анализа

Параметры	Номин.диапаз	Вычислен.	Профиль	Перенос	Внесистемные
№	g/l	Анализ PAIb	Тип Конеч.точка	Реакция Восходящий	
Единицы		Точность 2	Перв.крив 405	Втор.крив	
Об. пробы. 3		Об. R1. 250	Об. R2. 50	Лин. преде 0	
Время инк. 15		Антиген <input type="checkbox"/> Пров.антиг.	Ответ	Объем проб 0	
Время р -1 25		Субстрат 0	Н.предел 0	Отношение 0	
R1 холост		Смеш. хол.реаг.	В.предел 0	Полн.назв. Преальбумин	
Н.предел 0		Н.предел 0	Линейность	№ печати *	
В.предел 0		В.предел 0	Н.предел 0,04		
			В.предел 1,5		

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Параметры

Анализ PAIb Проба Сыворотка Пол Муж.

№	Пол	Возраст		Нормальн. диапазон		Ниж.предел	Верх.предел
		Лет	Месяцев	Лет	Месяцев		
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0,2	0,4

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Панель параметров анализатора Mindray BS-300. Включает в себя меню параметров, выбор анализа (РАIb), пробы (Сыворотка) и пола (Жен.).

Возраст				Нормальн. диапазон			
№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0,2	0,4

Панель параметров калибровки. Включает в себя метод (Logistic 5P) и таблицу калибраторов.

Выбрано	Калибратор	№ партии	Годен до	Уровень
<input checked="" type="checkbox"/>	TcPr-5	**	**	**
<input checked="" type="checkbox"/>	TcPr-4	**	**	**
<input checked="" type="checkbox"/>	TcPr-3	**	**	**
<input checked="" type="checkbox"/>	TcPr-2	**	**	**
<input checked="" type="checkbox"/>	TcPr-1	**	**	**
<input checked="" type="checkbox"/>	NaCl_0,9%	000	2020-01-01	0

Выбор
 Выбрано
 Просрочен

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Лог-лог5p, (сплайн) 6 точек (набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.