

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400


* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	70
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	70
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

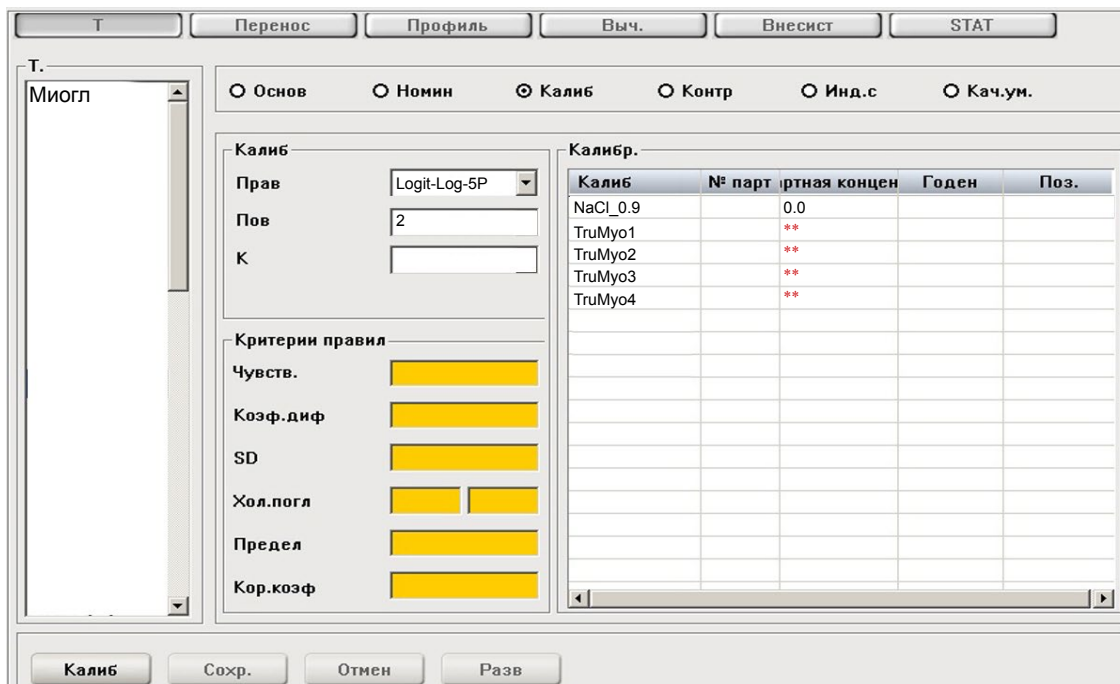

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеп	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruMyo1		**		
TruMyo2		**		
TruMyo3		**		
TruMyo4		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 5 точек, набор стандартов TruCal Myoglobin, 4 уровня + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.