

Антистрептолизин-О

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная	
ASLO	● Основной ○ Огранич. ○ Данн.кал ○ Свед.о КК			
	Проверка	ASLO		
	Тип реакции	фикс.время		
	Пер	578	<input type="checkbox"/> X/п реаг.	
	Втор		Направл	Ув.
	Задерж(с)	5	Об.Аспир.(мкл)	500
	Время изм.(с)	300	Темп	37
	Блок	МЕ/мл	Десятичн.	1
	Полное имя	АнтистрептолизинО		
	Добав.	Удал.	Сохран.	Отмена
			Возвр.	

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная	
ASLO	○ Основной ● Огранич. ○ Данн.кал ○ Свед.о КК			
	Эталон по умолч.	0	---	200
	Лин.диапазон	7	---	800
	АБС х/п реаг.		---	
	Пред.поглощен.			
	Лин.предел(%)			
		<input type="button" value="По дифф"/>		
Добав.	Удал.	Сохран.	Отмена	
			Возвр.	

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная	
ASLO	○ Основной ○ Огранич. ● Данн.кал ○ Свед.о КК			
	○ Коэффиц.К			
	● Правило	Log 5P		
	Повторить	2		
	<input checked="" type="checkbox"/> S1	0	<input checked="" type="checkbox"/> S5	См.паспорт
	<input checked="" type="checkbox"/> S2	См.паспорт	<input checked="" type="checkbox"/> S6	См.паспорт
	<input checked="" type="checkbox"/> S3	См.паспорт	<input type="checkbox"/> S7	
	<input checked="" type="checkbox"/> S4	См.паспорт	<input type="checkbox"/> S8	
	Добав.	Удал.	Сохран.	Отмена
			Возвр.	