



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

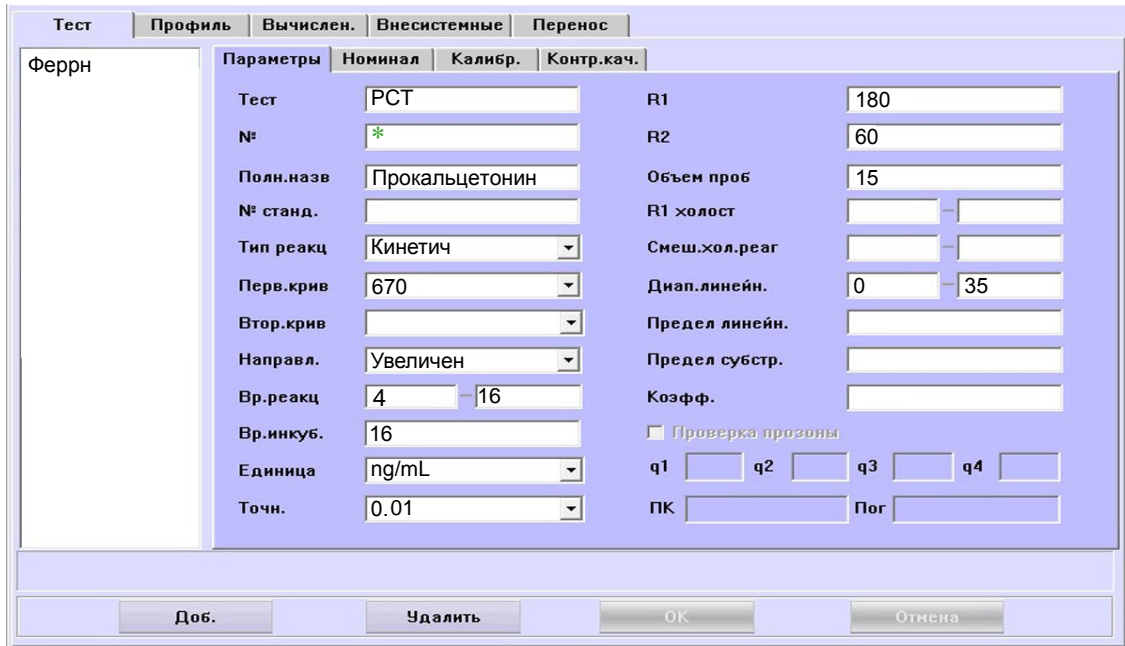

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

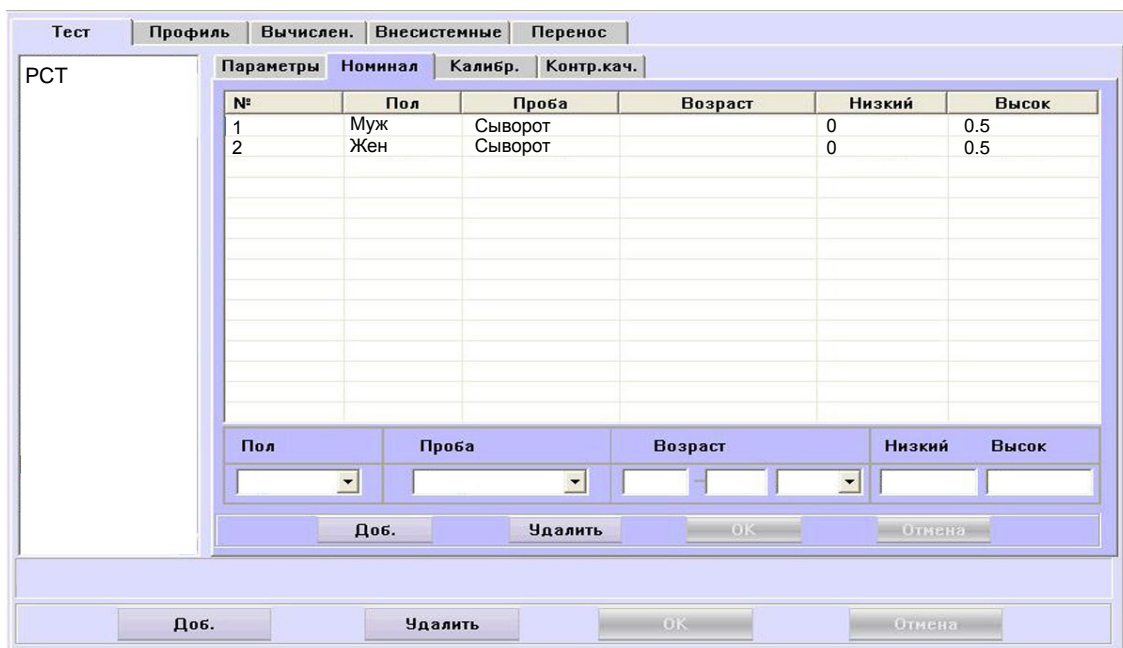

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высокий
1	Муж	Сыворот		0	0.5
2	Жен	Сыворот		0	0.5

(PCT)

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

PCT

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител. []

Повторы 2

Интервал(дн) []

Предел разл. []

SD []

Холост. ответ [] []

Предел ошибки []

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-5	**

Назв []

Конц. []

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

** -вводится из паспорта к калибратору (TruCal PCT, включает калибратор с конц. 0).
Контроль по TruLab PCT уровень 1 и уровень 2.

Значения калибраторов и контрольных материалов
вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.