

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
★ Тест : APOB	Автоповтор : <input type="checkbox"/>	Он-лайн калибровка : <input type="checkbox"/>
Наим. отчёта : Apo-B	Сuvette Wash : <input type="checkbox"/>	Всего реагентов : 2
Ед. : g/l	Знаки п/запятой : 1	★ Реагент R1 : APOB R1
Основная дл. волны : 340	Вспомогат. : ----	★ Реагент R2 : APOB R2
Тип метода : 2POINT	Тип калибровки : 5p-logit-log	
Нач. M1 : 15	Кон. M1 : 16	
★ Нач. M2 : 33	★ Кон. M2 : 34	
Дубли пробы : 1	Дубли стандарта : 2	
Дубли контроля : 1	Интервал контроля : 0	
Напр-ние реакции : Увеличение	Предел погл. : 0.0	
Предел прозоны, % : 0	Проверка прозоны : Нижн.	
Предел лин-сти, % : 0	Приращ. погл./мин. : 0.0	
Технич. минимум : 0	Технич. максимум : 2.5	
Y=aX+b a= 1 b= 0		

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
Тест : APOB		
Тип пробы : SERUM		

Объемы проб				Типы проб	
★ Норм.	: 2	µl	Проп. развед.	: 1	<input checked="" type="checkbox"/> X
Увелич.	: 5	µl	Проп. развед.	: 1	<input type="checkbox"/> X
Уменьш.	: 2	µl	Проп. развед.	: 4	<input checked="" type="checkbox"/> X
★ Объем стандарта	: 2	µl			

Объемы реагентов и скор. мешалки			
★ Объем R1	: 200	µl	★ Скор. мешалки R1 : Сред.
★ Объем R2	: 40	µl	★ Скор. мешалки R2 : Выс.

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : APOB

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	0.8 1.55
Экстр.	0 0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : APOB

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	0.8 1.55
Экстр.	0 0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Сплайн, 6 точек.

Набор стандартов TruCal Apo A1-B (5 уровней)+ вода (или физраствор).

Контроль по TruLab L уровень 1 и уровень 2 или TruLab N и TruLab P.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. **ВАЖНО!** В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !