

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
★ Тест : CK	Автоповтор : <input type="checkbox"/>	Он-лайн калиброе : <input type="checkbox"/>
Наим. отчёта : КФК	Он-лайн калиброе : <input type="checkbox"/>	Cuvette Wash : <input type="checkbox"/>
Ед. : U/l	Знаки п/запятой : 1	Всего реагентов : 2
Основная дл. волны : 340	Вспомогат. : 546	★ Реагент R1 : CK R1
Тип метода : Rate-A	Тип калибровки : Linear	★ Реагент R2 : CK R2
Нач. M1 : 0	Кон. M1 : 0	
★ Нач. M2 : 31	★ Кон. M2 : 62	
Дубли пробы : 1	Дубли стандарта : 2	
Дубли контроля : 1	Интервал контроля : 0	
Напр-ние реакции : Увеличение	Предел погл. : 0.0	
Предел прозоны, % : 0	Проверка прозоны : .	
Предел лин-сти, % : 0	Приращ. погл./мин. : 0.0	
Технич. минимум : 1.0	Технич. максимум : 1100.0	
Y=aX+b a= 1 b= 0		

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
Тест : CK		
Тип пробы : SERUM		

Объемы проб				Типы проб	
★ Норм.	: 8.0	µl	Проп. развед.	: 1	X
Увелич.	: 16.0	µl	Проп. развед.	: 1	X
Уменьш.	: 4.0	µl	Проп. развед.	: 5	X
★ Объем стандарта	: 8.0	µl			

Объемы реагентов и скор. мешалки			
★ Объем R1	: 160	µl	★ Скор. мешалки R1 : Сред.
★ Объем R2	: 40	µl	★ Скор. мешалки R2 : Выс.

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности | Объемы теста | **Контрольные интервалы**

Тест : CK
 Тип пробы : SERUM
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)
 Категория : Муж

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	0.0	171.0	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	0	0	

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ
 ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности | Объемы теста | **Контрольные интервалы**

Тест : CK
 Тип пробы : SERUM
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)
 Категория : Жен

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	0.0	145.0	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	0	0	

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ
 ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по фактору.
 Контроль по TruLab N и TruLab P.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !