

Лактат

LDH UV (ферментативный метод с ЛДГ)



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: LACT	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>		
Наим. отчёта	: Лактат	Он-лайн калибровк	: <input type="checkbox"/>		
Ед.	: mmol/l	Cuvette Wash	: <input type="checkbox"/>		
Основная дл. волны	: 340	Вспомогат.	: 546		
Тип метода	: 2POINT	Тип калибровки	: Linear		
Нач. M1	: 22	★ Реагент R1	: LACT R1		
★ Нач. M2	: 61	★ Реагент R2	: LACT R2		
★ Кон. M1	: 24				
★ Кон. M2	: 63				
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2		
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: Нижн.		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 0.1	Технич. максимум	: 13.3		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: LACT				
Тип пробы	: Plasma				
Объемы проб					
★ Норм.	: 2.8	µl	Проп. развед.	: 1	X
Увелич.	: 6.0	µl	Проп. развед.	: 1	X
Уменьш.	: 2.8	µl	Проп. развед.	: 3	X
★ Объем стандарта	: 2.8	µl			
Объемы реагентов и скор. мешалки					
★ Объем R1	: 180	µl	★ Скор. мешалки R1	: Сред.	
★ Объем R2	: 45	µl	★ Скор. мешалки R2	: Сред.	
Типы проб					
<input type="checkbox"/> SERUM					
<input type="checkbox"/> URINE					
<input type="checkbox"/> CSF					
<input checked="" type="checkbox"/> PLASMA					
<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD					
<input type="checkbox"/> OTHER					

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : LACT

Тип пробы : Plasma

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
★ Норм.	0.5	2.2
Экстр.	0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : LACT

Тип пробы : Plasma

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
★ Норм.	0.5	2.2
Экстр.	0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован.

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU). Контроль по TruLab N и TruLab P.

TruCal U