

# Ревматоидный фактор

Иммунотурбидиметрический



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: RF			Автоповтор	: <input type="checkbox"/>
Наим. отчёта	: Ревматоидный фактор				
Ед.	: IU/ml	Знаки п/запятой	: 0		
Основная дл. волны	: 340	Вспомогат.	: 700	Всего реагентов	: 2
Тип метода	: 2POINT	Тип калибровки	: 5P Logit-Log	★ Реагент R1	: RF R1
Нач. M1	: 22	Кон. M1	: 24	★ Реагент R2	: RF R2
★ Нач. M2	: 61	★ Кон. M2	: 63		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2		
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: .		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 0	Технич. максимум	: 500		
Y=aX+b	a= : 1	b= : 0			
<input type="button" value="УСТАН. АВТОПОВТОР"/>					
<input type="button" value="КОПИР. ТЕСТ"/>					
<input type="button" value="ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)"/>					

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: RF				
Тип пробы	: SERUM				
Объемы проб					
★ Норм.	: 16	µl	Проп. развед.	: 1	X
Увелич.	: 32	µl	Проп. развед.	: 1	X
Уменьш.	: 8	µl	Проп. развед.	: 1	X
★ Объем стандарта	: 16	µl			
Объемы реагентов и скор. мешалки					
★ Объем R1	: 180	µl	★ Скор. мешалки R1	: Сред.	
★ Объем R2	: 36	µl	★ Скор. мешалки R2	: Выс.	
Типы проб					
<input checked="" type="checkbox"/> SERUM					
<input type="checkbox"/> URINE					
<input type="checkbox"/> CSF					
<input type="checkbox"/> PLASMA					
<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD					
<input type="checkbox"/> OTHER					
<input type="button" value="КОПИР. ОБЪЕМЫ"/>					
<input type="button" value="ПРОСМ. ОБЪЕМОВ"/>					

# Ревматоидный фактор

ИттипоTD (Иммунотурбидиметрический)



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности    Объемы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : RF

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	: 0.0	15.0	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM
			<input type="checkbox"/> URINE
			<input type="checkbox"/> CSF
			<input type="checkbox"/> PLASMA
			<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD
			<input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	: 0	0	

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности    Объемы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : RF

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	: 0.0	15.0	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM
			<input type="checkbox"/> URINE
			<input type="checkbox"/> CSF
			<input type="checkbox"/> PLASMA
			<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD
			<input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	: 0	0	

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Сплайн, 6 точек. (набор стандартов TruCal RF, 5 уровней + вода или физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !