

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Т.
К

Основ Нонин Калиб Контр Инд.с Кач.ум.

Информация теста
 №: *
 Т: К
 П.наз: Калий
 Стан№:

Объем ргт
 R1: 150
 R2: 50
 R3:
 R4:

Объем проб
 Станд: 38
 Увел.: 5
 Умен.: 3

Параметры реакции
 Тип р: Кинетическ
 Напр.: Уменьшен
 Пер.к: 340
 Хол р: 0 0
 Вто.к: 546
 Вр.в.: 55 70

Настройка результат
 Десят: 0.01
 Уг.: 1
 Бл.: ммоль/л
 Отс.: 0

Критерии правил
 Погл.: 0 0
 Диап.: 2 10
 Увел.: 0
 Линит:
 Умен.: 0
 М суб:

Проз.
 Част Ант
 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0
 PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Т.
К

Основ Нонин Калиб Контр

По ум По ди

Пол: Пр.

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	3.6	5.4
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	3.6	5.4
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

The screenshot shows the calibration configuration window for Potassium (К) in the Mindray BS-400 software. The window has several tabs at the top: 'Т.', 'Перенос', 'Профиль', 'Выч.', 'Внесист', and 'STAT'. The 'Калиб' (Calibration) tab is selected. On the left, a list contains 'Т.' and 'К'. The main area is divided into two sections: 'Калиб' (Calibration) and 'Калибр.' (Calibrators).

Калиб (Calibration) section:

- Прав (Right): Двухточ. линейн (Two-point linear)
- Пов (Slope): 2
- К (Intercept):

Калибр. (Calibrators) section:

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
K-std-1		3.0 **		
K-std-2		7.0		

Критерии правил (Criteria rules) section:

- Чувств. (Sensitivity):
- Кэф. диф (Coeff. diff):
- SD:
- Хол. погл (Blank absorbance):
- Предел (Limit):
- Кор. коэф (Corr. coeff):

At the bottom, there are buttons: 'Калиб', 'Сохранить', 'Отмена', and 'Разрешить'.

** - вводится из инструкции к набору.

Тип калибровки: Линейная, по стандартам из набора.
Контроль по TruLab N и TruLab P.