


(PCT)

ИттипоTD (Иммунотурбидиметрический с латексными частицами)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

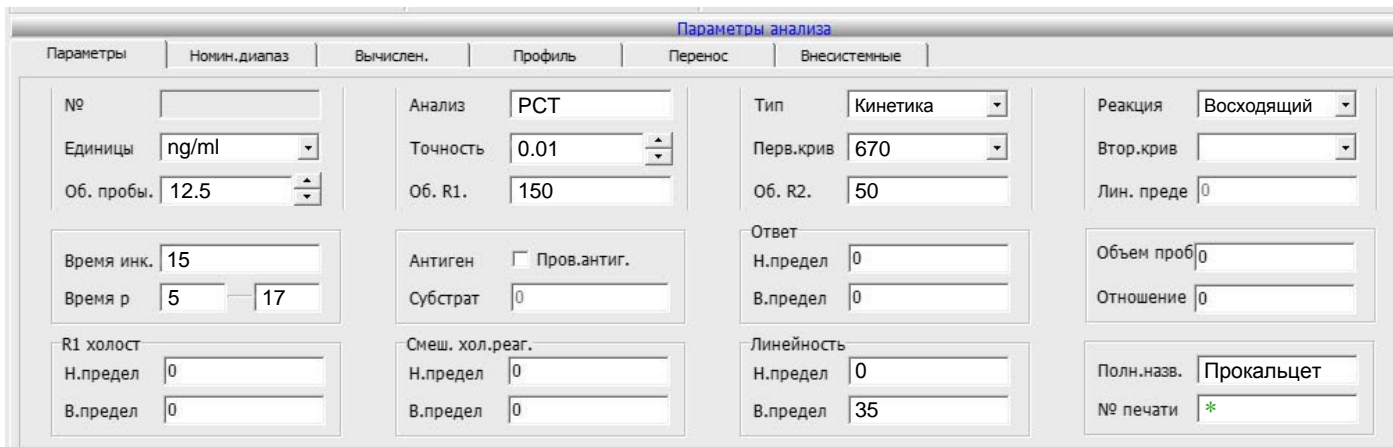


Параметры анализа

Параметры	Номин.диапаз	Вычислен.	Профиль	Перенос	Внесистемные
№		Анализ: PCT	Тип: Кинетика	Реакция: Восходящий	
Единицы: ng/ml		Точность: 0.01	Перв.крив: 670	Втор.крив:	
Об. пробы: 12.5		Об. R1: 150	Об. R2: 50	Лин. преде: 0	
Время инк: 15		Антиген: <input type="checkbox"/> Пров.антиг.	Ответ: Н.предел: 0	Объем проб: 0	
Время р: 5 — 17		Субстрат: 0	В.предел: 0	Отношение: 0	
R1 холост: Н.предел: 0		Смеш. хол.реаг.: Н.предел: 0	Линейность: Н.предел: 0	Полн.назв.: Прокальцет	
В.предел: 0		В.предел: 0	В.предел: 35	№ печати: *	

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

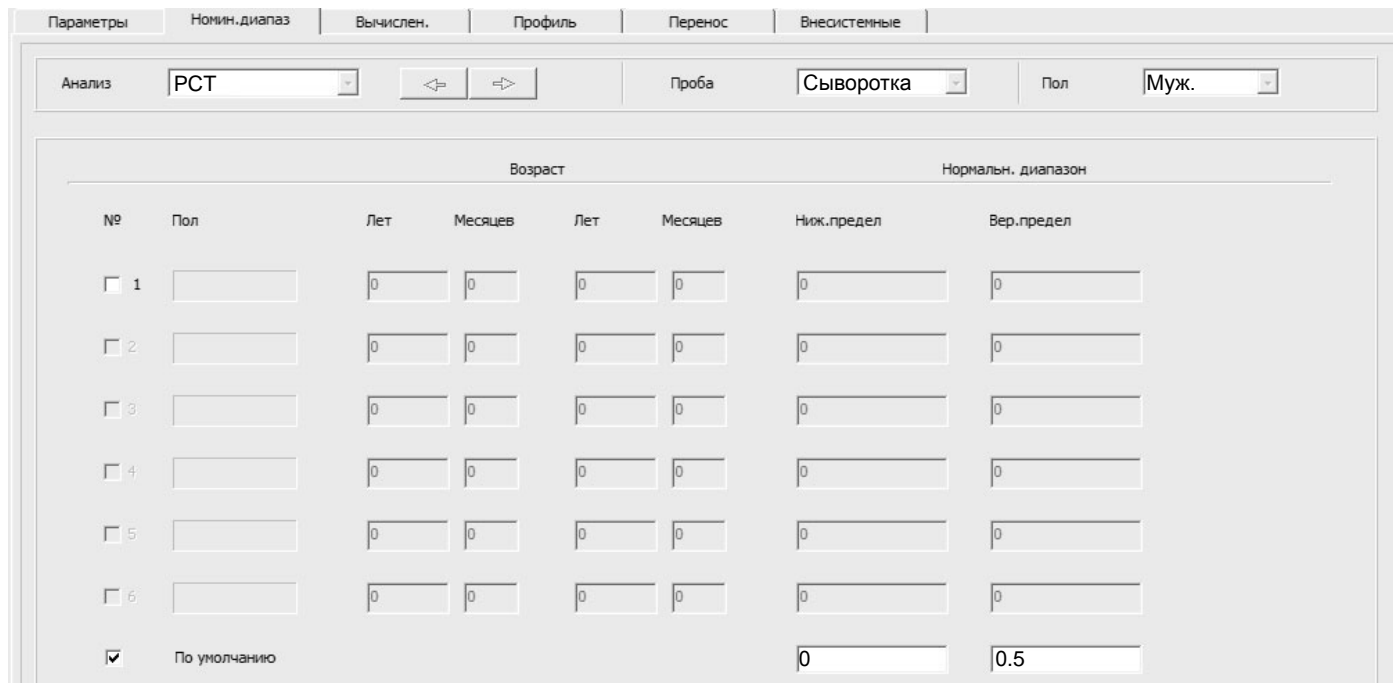

Параметры

Анализ: PCT Проба: Сыворотка Пол: Муж.

№	Пол	Возраст		Нормальн. диапазон		Ниж.предел	Верх.предел
		Лет	Месяцев	Лет	Месяцев		
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0	0.5

(PCT)

ИттипоТD (Иммунотурбидиметрический с латексными частицами)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

Анализ: PCT Проба: Сыворотка Пол: Жен.

№	Пол	Возраст		Нормальн. диапазон		Ниж.предел	Вер.предел
		Лет	Месяцев	Лет	Месяцев		
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0	0.5

Правило

Метод: Logistic 5P

Коэфф.К: 0

Экземпляры: 2

Интервал: 0

Чувствительность: 0

Определение коэффициента: 0

Предел ошиб. для повт. обраб.: 0

Холостой ответ: 0 0

Предел различий: 0

SD: 0

Калибраторы

Выбрано	Калибратор	№ партии	Годен до	Уровень
<input checked="" type="checkbox"/>	PCT5	**	**	*
<input checked="" type="checkbox"/>	PCT4	**	**	*
<input checked="" type="checkbox"/>	PCT3	**	**	*
<input checked="" type="checkbox"/>	PCT2	**	**	*
<input checked="" type="checkbox"/>	PCT1	**	**	*
<input checked="" type="checkbox"/>	PCT0	**	**	0

Выбор Выбрано Просрочен

* - Водится из паспорта к калибратору. ** - Выбирается пользователем.

TruCal PCT, включает калибратор с конц. 0.

Контроль по TruLab PCT уровень 1 и уровень 2.