

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: CAP	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>	Он-лайн калибровк	: <input type="checkbox"/>
Наим. отчёта	: Кальций	Cuvette Wash	: <input type="checkbox"/>	Всего реагентов	: 2
Ед.	: mmol/l	Знаки п/запятой	: 2	★ Реагент R1	: CAP R1
Основная дл. волны	: 660	Вспомогат.	: 700	★ Реагент R2	: CAP R2
Тип метода	: 2POINT	Тип калибровки	: Linear		
Нач. M1	: 22	Кон. M1	: 24		
★ Нач. M2	: 58	★ Кон. M2	: 60		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2		
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Уменьшение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: Верх.		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 0.01	Технич. максимум	: 6.24		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: CAP				
Тип пробы	: SERUM				
Объемы проб					
★ Норм.	: 2.0	µl	Проп. развед.	: 1	X
Увелич.	: 4.0	µl	Проп. развед.	: 1	X
Уменьш.	: 3.0	µl	Проп. развед.	: 4	X
★ Объем стандарта	: 2.0	µl			
Объемы реагентов и скор. мешалки					
★ Объем R1	: 200	µl	★ Скор. мешалки R1	: Выс.	
★ Объем R2	: 50	µl	★ Скор. мешалки R2	: Выс.	
Типы проб <input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER					

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : CAP

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
★ Норм.	: 2.15	2.57
Экстр.	: 0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : CAP

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
★ Норм.	: 2.15	2.57
Экстр.	: 0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по стандарту из набора. Контроль по TruLab N и TruLab P.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !