

Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 680

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="CK"/>				Type: <input type="text" value="Serum"/>	Operation: <input type="text" value="Yes"/>
Sample Volume	<input type="text" value="5"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	μL
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/>		OD Limit	<input type="text" value="-2.0"/>	<input type="text" value="2.5"/>
Rgt. Volume	R1(R1-1)	<input type="text" value="100"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>
	R2(R2-1)	<input type="text" value="25"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>
Wavelength	Pri	<input type="text" value="340"/>	nm	Sec.	<input type="text" value="540"/>
Method		<input type="text" value="RATE"/>			
Reaction Slope		<input type="text" value="+"/>			
Measuring Point1	First	<input type="text" value="14"/>	Last	<input type="text" value="26"/>	
Measuring Point2	First		Last		
Linearity Limit					
Lag Time Check		<input type="text" value="NO"/>			

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="CK"/>				Type: <input type="text" value="Serum"/>	
Value/Flag:	<input type="text"/>	Level L:	<input type="text"/>	Level H:	<input type="text"/>
Specific Ranges:					
	Sex	Year	Month	Year	Month
<input type="checkbox"/>	1. M	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	2. F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	5.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	6.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	7. No demographics			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="171"/>
<input type="checkbox"/>	8. Not within expected values			<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit:	<input type="text" value="U/L"/>	Decimal Places:	<input type="text" value="1"/>	Panic Value	
				Low	High

Parameters		Calibration Parameters			
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration			
General	ISE				
Test Name: <input type="text" value="CK"/>				Type: <input type="text" value="Serum"/>	<input type="checkbox"/> Use Serum Cal.
Calibration Type:	<input type="text" value="AB"/>	Formula:	<input type="text" value="Y=AX+B"/>	Counts:	<input type="text" value="2"/>
<Calibrator Parameters>					
Calibrator	OD	Conc	Factor/OD range	Low	High
Point 1:	TruCal U		*	-99999	99999
Point 2:					
Point 3:					
Point 4:					
Point 5:					
Point 6:					
Point 7:					
Point 8:					
Point 9:					
Point 10:					
<Point Cal. For		No. of Correction Points	<input type="text"/>	Use Master Curve	<input type="checkbox"/>
Master Curve>		Calibrator	OD	Conc	OD Range
Point 1:					Low
Point 2:					High
Stability					
Reagent Blank	<input type="text"/>	Day	<input type="text"/>	Hour	
Calibration	<input type="text"/>	Day	<input type="text"/>	Hour	
MB Type Factor:	<input type="text"/>	1-Point Calibration Point	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> with Conc-0	

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя.

Калибровка линейная, АВ (калибратор TruCal U) или по фактору -МВ фактор см. инструкцию; вводится в поле MB Type Factor.

Контроль TruLab N и TruLab P.

*-вводится из паспорта к калибратору.