

Ревматоидный фактор

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-800

Опред./правка химанализов

Хим.	RF	№ *		Тип пробы	Сыворотка
Химанализ	IT			Имя для печ	Ревм.фактор

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Тип реакции	Контрольная точка	Направление реакции	Положительный			
Перв. д/в	340	Втор. д/в	800			
Ед.изм.	МЕ/мл	Десятич	0,10			
Время хол.	13 15	Время реакции	31 33			
Об. Пробы	Стандарт 7.6 uL	Аспирировано	uL	Разбавитель	uL	<input type="checkbox"/> Холост.проб
Понижен.	3 uL	uL	uL	P1 125 uL	P2 25 uL	
Повышенный	12 uL	uL	uL	P3 uL	P4 uL	

Диап.линейности	10 500	<input type="checkbox"/> Автоповтор	
Предел линейности		Истощение субстрата	
Поглощ.хол. P1	-34000 34000	Смеш.хол.погл.	-34000 34000
Отклик холост.	-34000 34000	Вр.после открытия	Дней
Парн.химанализ			
<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	<input checked="" type="radio"/> Пров. скорости	<input checked="" type="radio"/> Внесение антигена	
Q1	Q2	Q3	Q4
PC	ABS		

Нормальные величины для сыворотки (плазмы):

Мужчины: 0-15

Женщины: 0-15

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal RF, 5 уровней + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.