

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

Итого (прямой иммуно)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0.9	4.7
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	1.0	4.7
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

Иттипо (прямой иммуно)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеи	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruCalL		**		

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: линейная (калибратор TruCal HDL/LDL).

Контроль по TruLab N и TruLab P, или по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.