

Иммуноглобулин А, Ig-A

ИттипоTD (Иммунотурбидиметрический)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

| Назв | Конц. |
|--|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> NaCl | 0.0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> TcPr-1 | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> TcPr-2 | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> TcPr-3 | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> TcPr-4 | ** |
| <input checked="" type="checkbox"/> TcPr-5 | ** |

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Logit-Log или сплайн, 6 точек (набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней+ вода (физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.