

Антистрептолизин-О

ИтипоTD (Иммунотурбидиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест	АСЛО	R1	200
№	*	R2	40
Полн.назв	Антистрептлзн-О	Объем проб	2.4
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кинетич	Смеш.хол.реак	
Перв.крив	546	Диап.линейн.	7 - 800
Втор.крив		Предел линейн.	
Направл.	Увеличен	Предел субстр.	
Вр.реакц	2 - 15	Козфф.	
Вр.инкуб.	14	Комп.	Наклон 1 Отс. 0
Единица	IU/mL	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	
Точн.	Целое	q1	q2 q3 q4
		ПК	Пог

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	200
2	Жен	Сыворот		0	200

Тип калибровки: сплайн или логит-лог5р, 6 точек (набор стандартов TruCal ASLO, 5 уровней + вода (или физр-р)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.

