



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

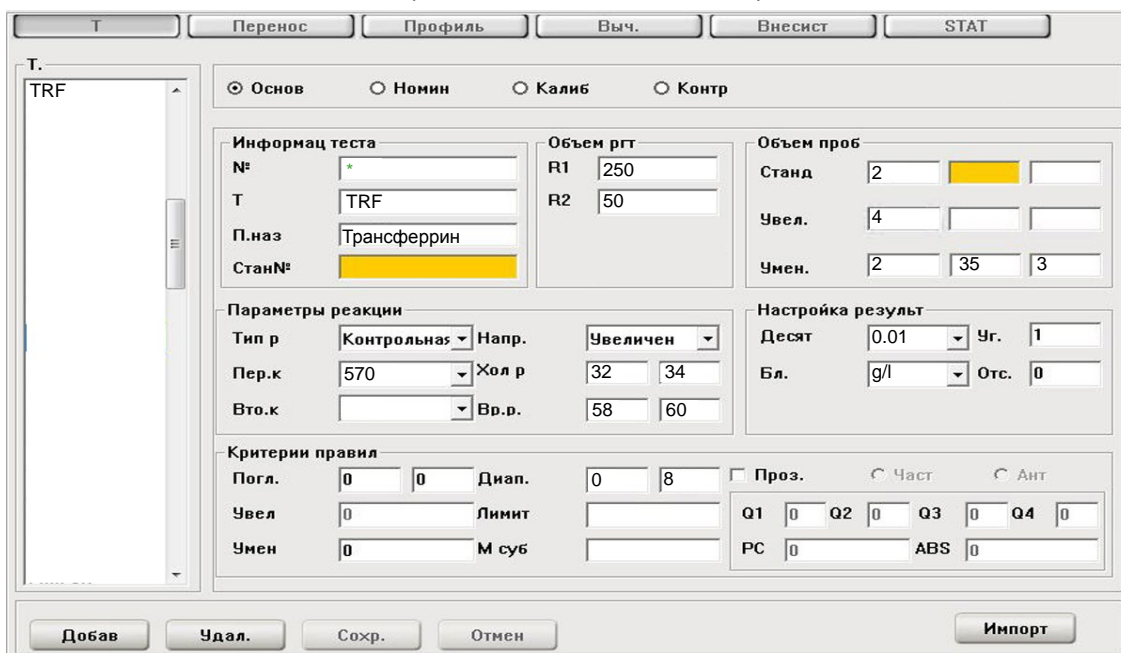

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

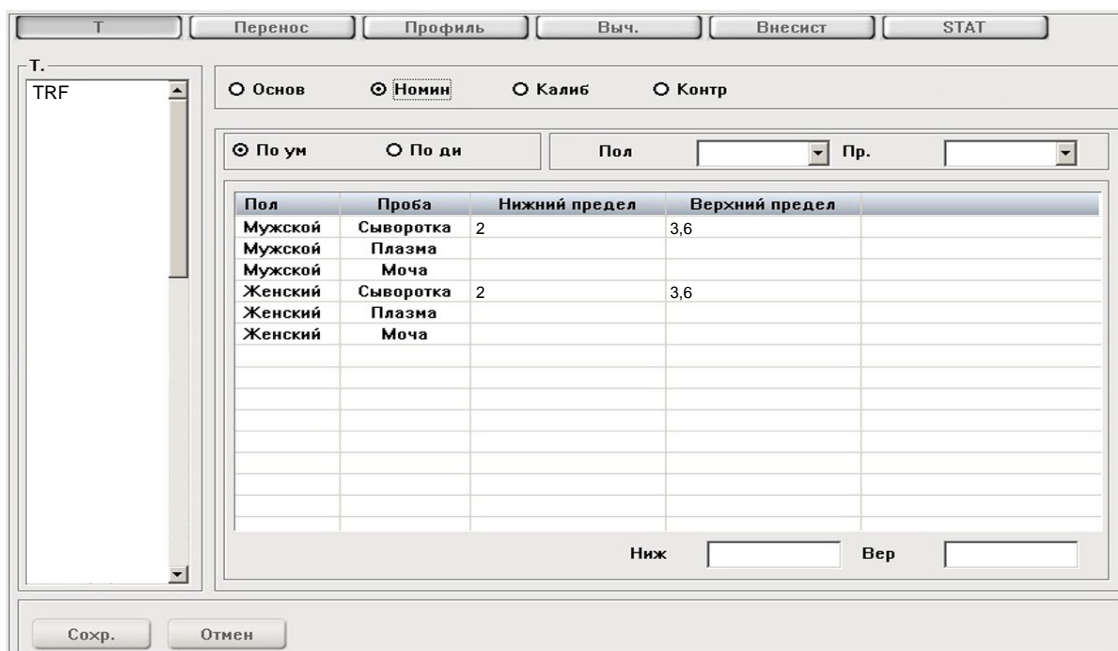

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	2	3,6
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	2	3,6
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

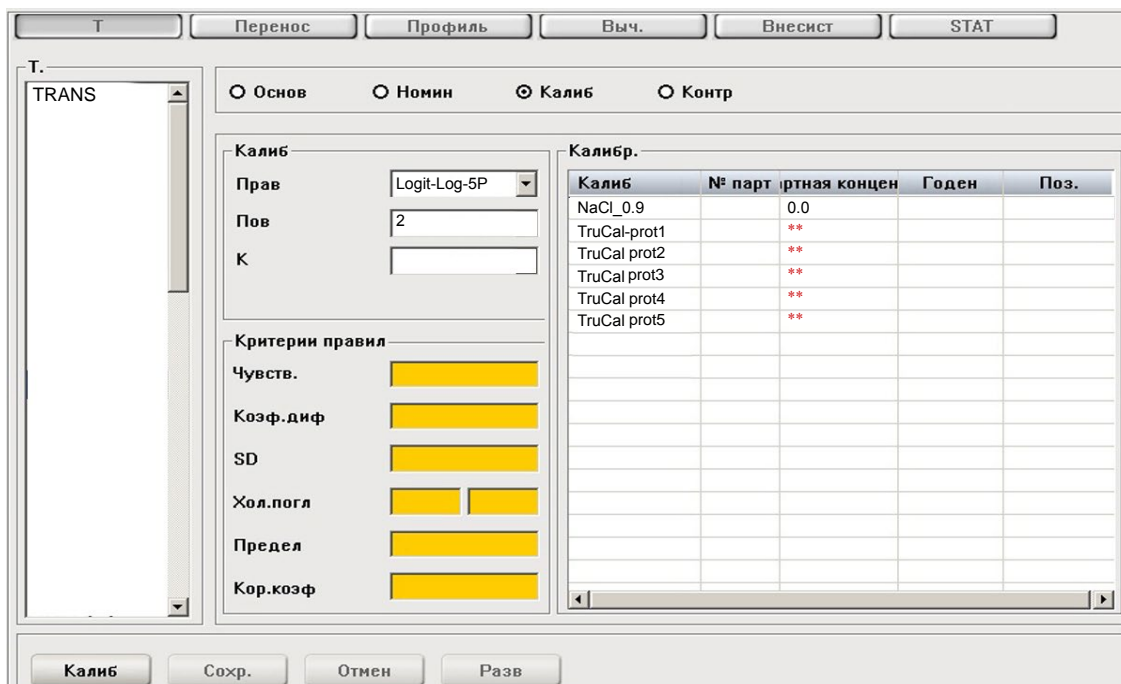

Т. TRANS

Основ
  Нонин
  Калиб
  Контр

**Калиб**  
 Прав: Logit-Log-5P  
 Пов: 2  
 К:

**Калибр.**

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruCal-prot1		**		
TruCal prot2		**		
TruCal prot3		**		
TruCal prot4		**		
TruCal prot5		**		

**Критерии правил**  
 Чувств.:   
 Коэф. диф:   
 SD:   
 Хол. погл:    
 Предел:   
 Кор. коэф:

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.