

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Цист-С

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител. []

Повторы 2

Интервал(дн) []

Предел разл. []

SD []

Холост. ответ [] []

Предел ошибки []

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> CysC-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> CysC-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> CysC-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> CysC-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> CysC-5	**

Назв []

Конц. []

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | OK | Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору.

Тип калибровки: Лог-лог5р, (сплайн) 6 точек, набор стандартов TruCal Cystatin C, 5 уровней + вода (или физраствор).

Контроль по TruLab Cystatin C уровень 1 и 2.