



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

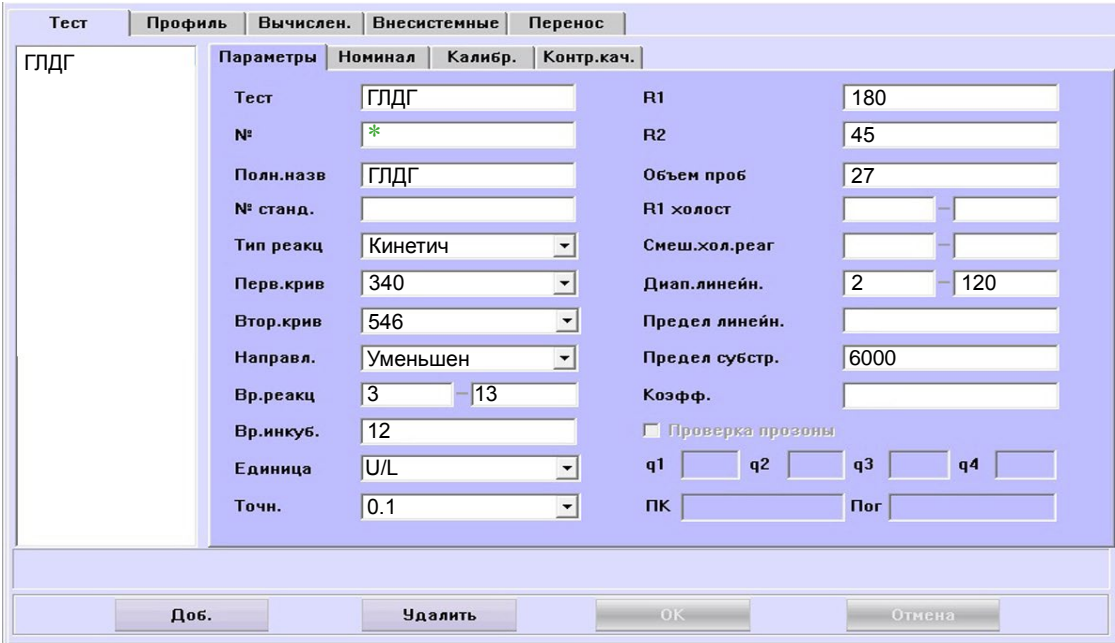


* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

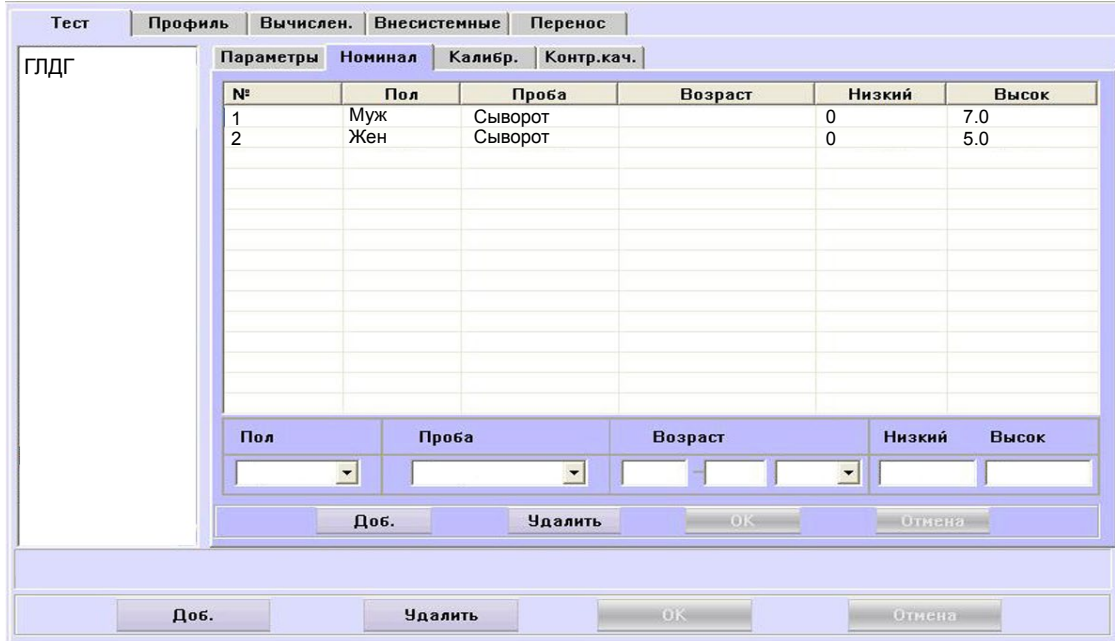

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	7.0
2	Жен	Сыворот		0	5.0

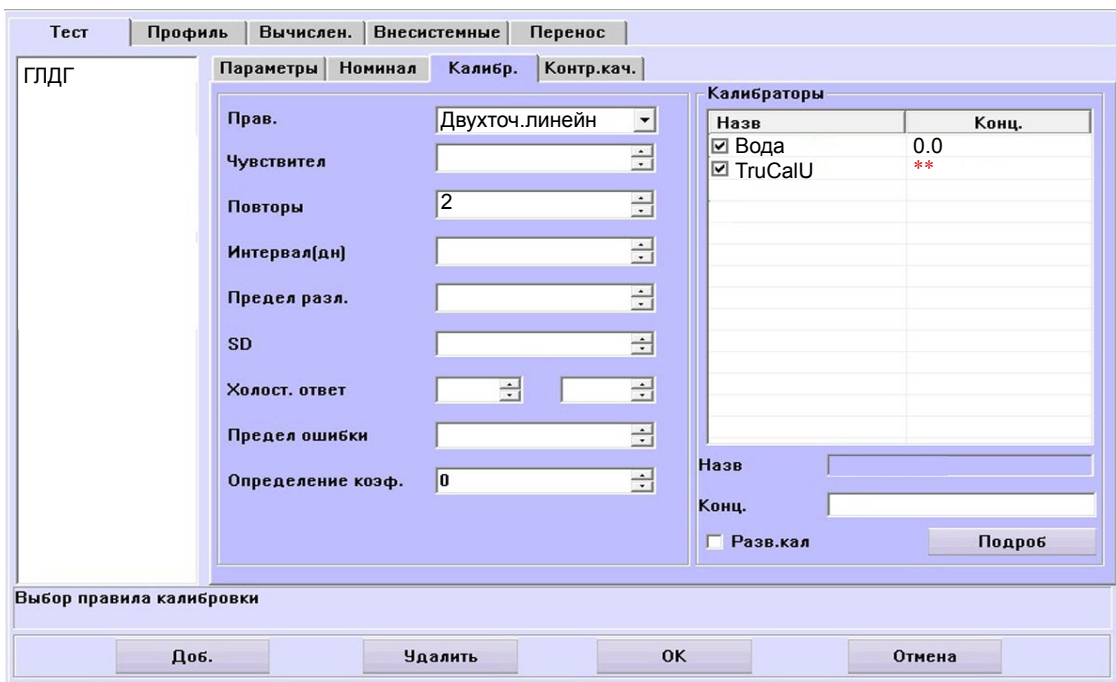

Тест Профиль Вычислен. Внесистемные Перенос

ГЛДГ

Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствител -

Повторы 2

Интервал(дн) -

Предел разл. -

SD -

Холост. ответ -

Предел ошибки -

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

Назв -

Конц. -

Разв.кал

Выбор правила калибровки

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по фактору.
Контроль по TruLab N и TruLab P.