



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

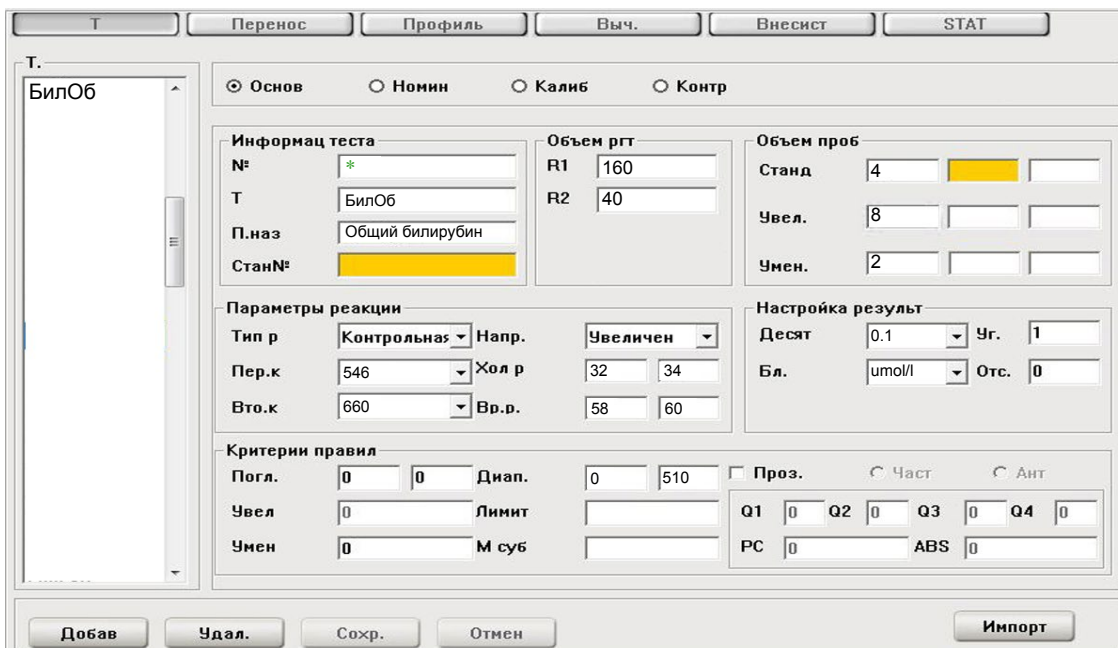

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

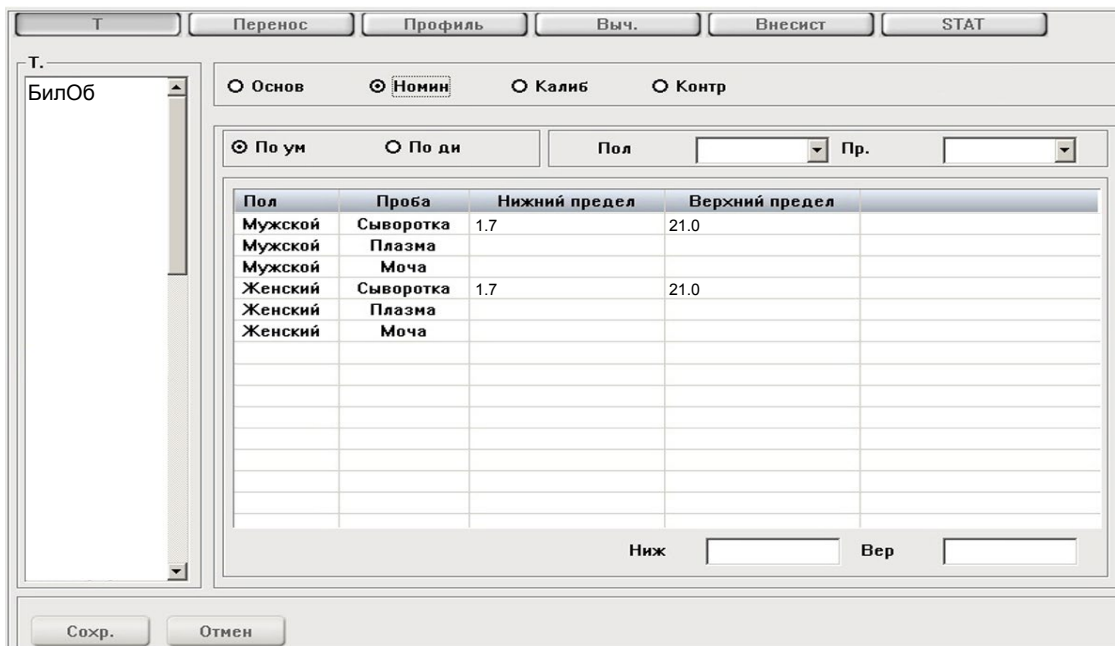

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	1.7	21.0
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	1.7	21.0
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

