

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры анализа

| | | | | | |
|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--------------|
| Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные |
| № | | Анализ | IgA | Тип | Конеч.точка |
| Единицы | g/l | Точность | 2 | Перв.крив | 570 |
| Об. пробы. | 3 | Об. R1. | 375 | Об. R2. | 75 |
| Время инк. | 15 | Антиген | <input type="checkbox"/> Пров.антиг. | Ответ | |
| Время р | -1 — 15 | Субстрат | 0 | Н.предел | 0 |
| R1 холост | | Смеш. хол.реаг. | | В.предел | 0 |
| Н.предел | 0 | Н.предел | 0 | Линейность | |
| В.предел | 0 | В.предел | 0 | Н.предел | 0,3 |
| | | | | В.предел | 9 |
| | | | | Полн.назв. | Иммуноглоб-А |
| | | | | № печати | * |

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Параметры

Анализ: IgA Проба: Сыворотка Пол: Муж.

| № | Пол | Возраст | | Нормальн. диапазон | | Ниж.предел | Верх.предел |
|-------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------------|---------|------------|-------------|
| | | Лет | Месяцев | Лет | Месяцев | | |
| <input type="checkbox"/> 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | По умолчанию | | | | | 0,7 | 4 |

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

| Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Анализ | IgA | <input type="button" value="←"/> | <input type="button" value="→"/> | Проба | Сыворотка | Пол | Жен. |
| | | Возраст | | Нормальн. диапазон | | | |
| № | Пол | Лет | Месяцев | Лет | Месяцев | Ниж.предел | Вер.предел |
| <input type="checkbox"/> 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> 5 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> 6 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | По умолчанию | | | | | 0,7 | 4 |

| Правило | | | | Калибраторы | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------|---------|
| Метод | Logistic 5P | | | Выбрано | Калибратор | № партии | Годен до | Уровень |
| Коэфф.К | <input type="text"/> | Предел ошиб. для повт. обраб. | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TcPr-5 | ** | ** | ** |
| Экземпляры | <input type="text"/> | Холостой ответ | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TcPr-4 | ** | ** | ** |
| Интервал | <input type="text"/> | Предел различий | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TcPr-3 | ** | ** | ** |
| Чувствительность | <input type="text"/> | SD | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TcPr-2 | ** | ** | ** |
| Определение коэффициента | <input type="text"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | TcPr-1 | ** | ** | ** |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | NaCl_0,9% | 000 | 2020-01-01 | 0 |
| | | | | <input type="checkbox"/> Выбор | <input checked="" type="checkbox"/> Выбрано | <input type="checkbox"/> Просрочен | | |

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Логит-лог5p, (сплайн), 6 точек (набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.