

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400


* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0.2	0.4
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0.2	0.4
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

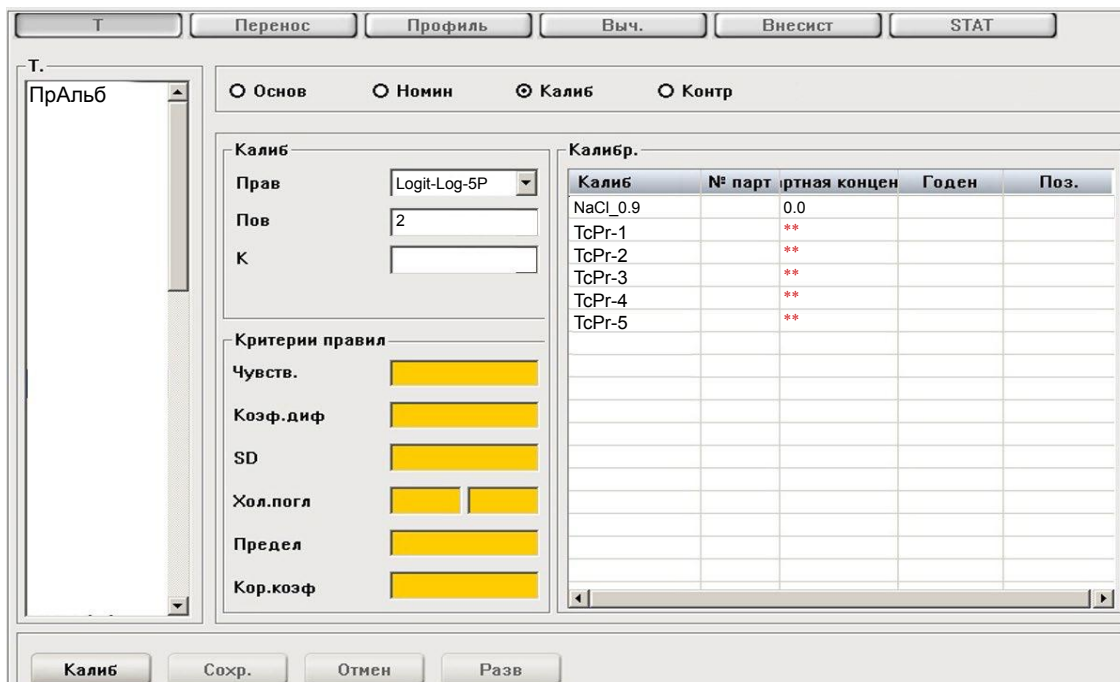

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TcPr-1		**		
TcPr-2		**		
TcPr-3		**		
TcPr-4		**		
TcPr-5		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit, (сплайн) 6 точек, набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (или физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.