

# (PCT)

ИттипоTD (Иммунотурбидиметрический с латексными частицами)



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест    Профиль    Вычислен.    Внесистемные    Перенос

Феррн

Параметры    Номинал    Калибр.    Контр.кач.

Тест	PCT	R1	150
№	*	R2	50
Полн.назв	Прокальцетонин	Объем проб	12.5
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кинетич	Смеш.хол.реаг	
Перв.крив	660	Диап.линейн.	5 - 1000
Втор.крив		Предел линейн.	
Направл.	Увеличен	Предел субстр.	
Вр.реакц	4 - 16	Козфф.	
Вр.инкуб.	16	Комп.	Наклон 1    Отс. 0
Единица	ng/ml	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	
Точн.	0.01	q1	q2    q3    q4
		ПК	Пог

Доб.    Удалить    ОК    Отмена

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест    Профиль    Вычислен.    Внесистемные    Перенос

Феррн

Параметры    Номинал    Калибр.    Контр.кач.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	0.5
2	Жен	Сыворот		0	0.5

Пол    Проба    Возраст    Низкий    Высок

Доб.    Удалить    ОК    Отмена

Доб.    Удалить    ОК    Отмена

(PCT)

ИттипоTD (Иммунотурбидиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> PCT-5	**

\*\* -вводится из паспорта к калибратору (TruCal PCT, включает калибратор с конц. 0).  
Контроль по TruLab PCT уровень 1 и уровень 2.