



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

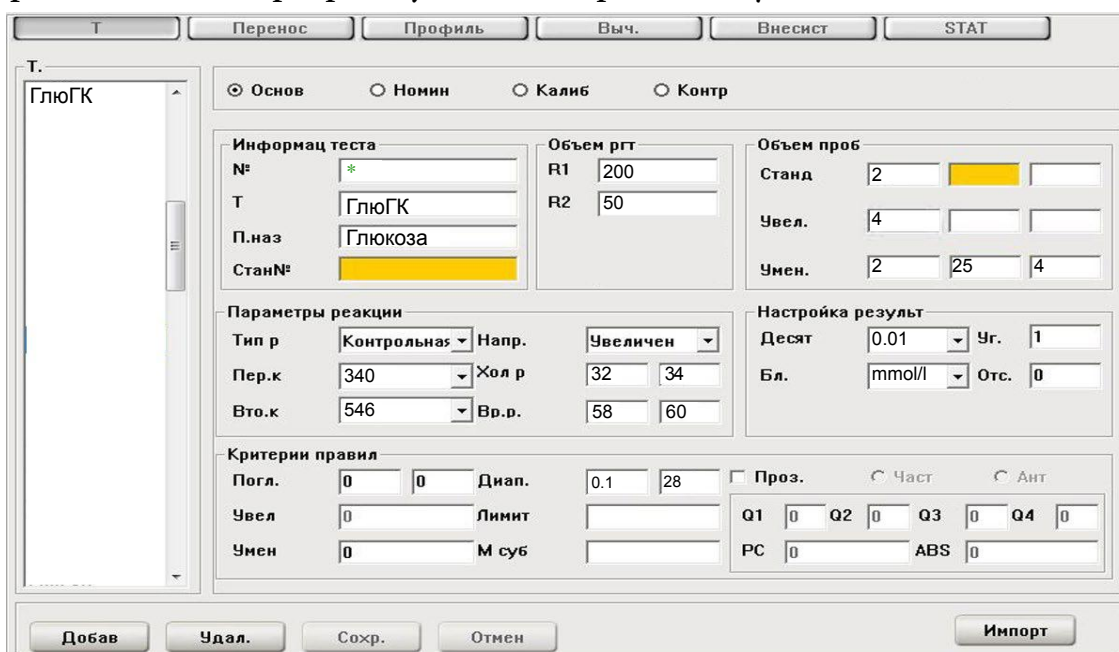

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

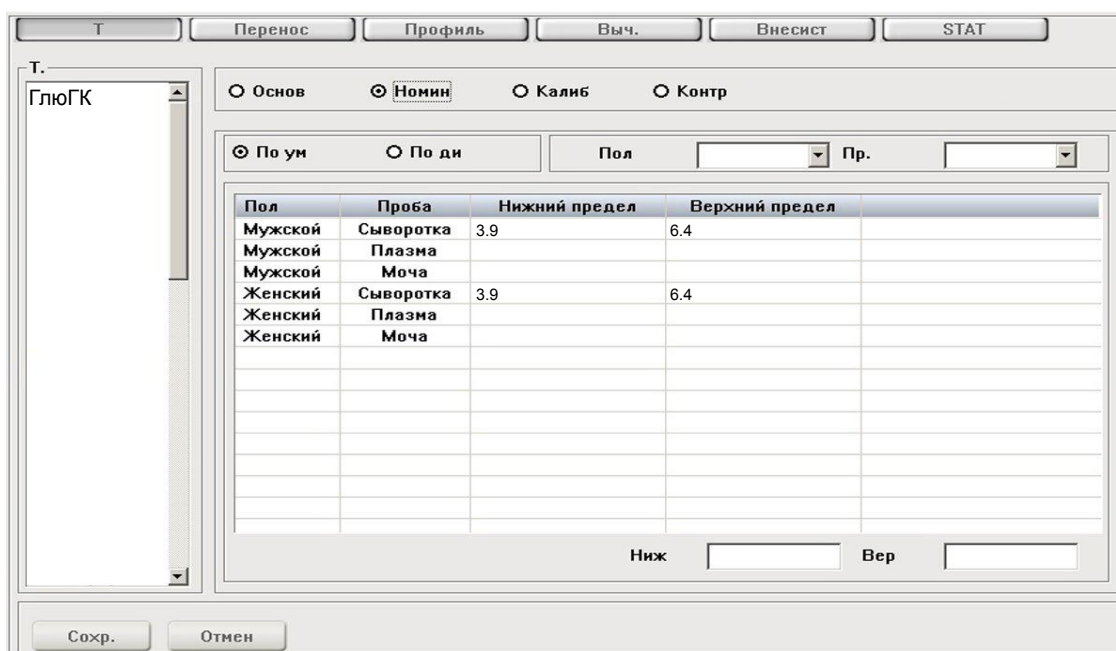

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	3.9	6.4
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	3.9	6.4
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

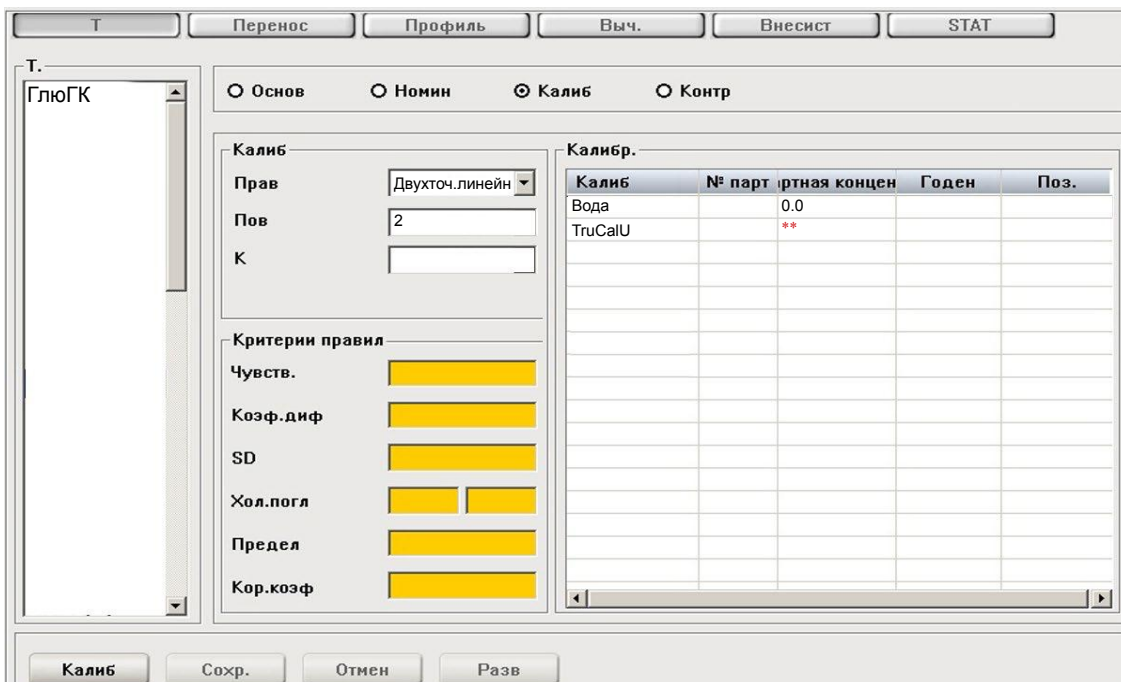

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
Вода		0.0		
TruCalU		**		

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).  
Контроль по TruLab N и TruLab P.

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно